

STEPTY™

GB ABSORBABLE HEMOSTATIC PRESSURE DRESSING
FI IMUKYKYINEN HEMOSTAATTINEN PAINESIDE
FR COMPRESSE ABSORBANTE À PRESSION HÉMOSTATIQUE
DE ABSORPTIONSFÄHIGER BLUTSTILLENDE DRUCKVERBAND
NL ABSORBEERBAAR HEMOSTATISCH DRUKVERBAND
IT BENDAGGIO EMOSTATICO COMPRESSIVO ASSORBENTE
ES APÓSITO COMPRESIVO HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE

CE
0086

Laastari tyrehdyttävällä puristustyynyllä (pistoskohdan suojaukseen)

Steriloitu etyleenioksidikaasulla

STERIILI

EO

Steriloitu etyleenioksidikaasulla

Valmistettu Japanissa



Ei saa käyttää uudelleen



Erinomainen puristus ja hyvä tyrehdysteho neulan poiston jälkeen


Hyvä puristusteho saavutetaan 6 mm paksun tyynyn ja laastarin elastisten ominaisuuksien ansiosta. Käytetään verinäytteenoton tai perifeerisen laskimokanyylin poiston jälkeen.

Erittely

Tuotenumero	Koko			Laatikossa
	Laastarin koko	Tyynyn koko	Levyn koko	
4987167070090	39 x 80 mm	27 x 15 mm	36 x 30 mm	50 arkkia

Käyttöohjeet

Irrota suojapaperi vain osittain. Aseta laastarin keskikohta ihoa vasten ja venytä noin 1 cm (kun käytössä on STEPTY P 2 cm).

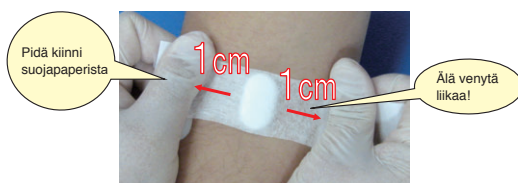

Venytä laastarin liimaosat yksitellen 1cm/siiveke.

Hygieeninen kompressio

Ominaisuudet

Laatu ja helppokäyttöisyys säästävät hoitotyöhön kuluvaa aikaa.

Tyyny

Erittäin imukykyinen 6 mm paksu tyyny

● 27 mm pitkä soikea tyyny.

Peittää ja puristaa pistokohtaa.

● Soikea muoto helpottaa ihon stimulointia.

Laastari

Erittäin elastinen ja taipuisa uretaanikuitukangaslaastari

● Hypoallergeeninen akryyliiliima-aine


● Suojapaperissa on suuri irrottamista helpottava kieleke.

Käyttö


• Veripalvelu: ääreislaskimon puristus ja suojaus verenluovutuksen tai verenoton jälkeen.

• Sairaala, klinikka: ääreislaskimon puristus ja suojaus verenoton, verensiirron tai tiputuksen jälkeen.


Käyttöesimerkki

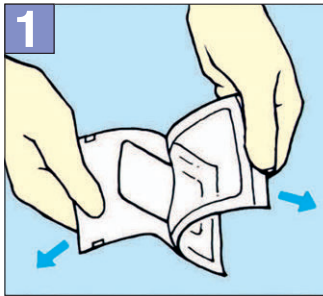


1 Avaa sterilipakkaus ja ota painelaastari pakkauksesta.

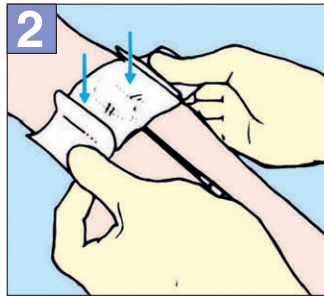


2 Kohdista laastarissa oleva haavatyynty verisuonen suuntaisesti ennen neulan poistamista ja pidä sitä paikoillaan.

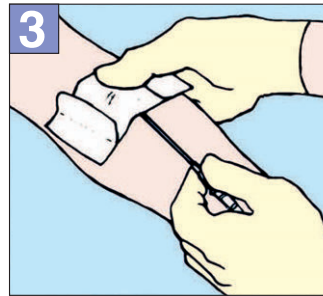

3 Pidä haavatyyntä kevyesti paikallaan ja vedä neula pois.

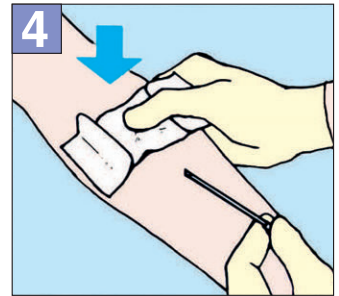

4 Pidä haavatyyntä kevyesti paikallaan ja vedä neula pois.

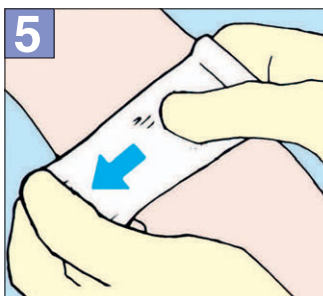

5 Venytä laastaria 1 cm leveydeltä ja kiinnitä se tukevasti ihoon.



6 Vaihda puristavaa peukaloa niin, että tyyny ei pääse liikkumaan ja jatka puristamista.



7 Kiinnitä toinen laastarin siiveke samalla tavalla



8 Stepty™ painelaastari kiinnitettynä iholle.

VAROTOIMET

- Jos haavaan tulee tuotteen käytön aikana kliininen infektio, lopeta tuotteen käyttö ja hoida infektio.
- Jos esiintyy iho-oireita (esim. ihottumaa, kuumotusta tai kutinaa) esiintyy, lopeta tuotteen käyttö ja hoida oireet.
- Irrota neula aina ennen tuotteen kiinnittämistä, jotta iho tai verisuonet eivät vaurioiduisi.
- Painelaastarien pitkäkestoinen käyttö aiheuttaa liiallista jännitystä, mikä rasittaa ihoa.
- Suosittelemme painelaastarin poistamista noin 2 tunnin kuluttua sen asettamisesta.
- Varmista ennen laastarin irrottamista, että verenvuoto on loppunut. Tarvittaessa tyrehdytä verenvuoto puristamalla.

- Suojaa pistokohta.
- Jos painelaastari kastuu tai likaantuu, irrota se viipymättä ja kiinnitä tilalle uusi.
- Jos tuotteen pakkaus vahingoittuu, hajoa tai kastuu, älä käytä tuotetta.
- Tuote on käytettävä välittömästi pakkauksen avaamisen jälkeen.
- Ihovaurioiden välttämiseksi irrota laastari hitaasti ihoarvojen suuntaisesti.
- Ei saa käyttää uudelleen.

Tuotteen säilytys

- Säilytetään huoneenlämmössä vedeltä, korkeilta lämpötiloilta, kosteudelta ja suoralta auringonvalolta suojattuna.