

STEPTY™ P

(GB) ABSORBABLE HEMOSTATIC PRESSURE DRESSING
 (F) IMUKYKYINEN HEMOSTAATTINEN PAINESIDE
 (FR) COMPRESSE ABSORBANTE À PRESSION HÉMOSTATIQUE
 (DE) ABSORPTIONSFÄHIGER BLUTSTILLENDE DRUCKVERBAND
 (NL) ABSORBEERBAAR HEMOSTATISCH DRUKVERBAND
 (IT) BENDAGGIO EMOSTATICO COMPRESSIVO ASSORBENTE
 (ES) APÓSITO COMPRESIVO HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE

CE
0086

Laastari puristustyynyllä (pistoskohdan suojaukseen)

Valmistettu Japanissa

STERIILI EO Steriloitu etyleenioksidikaasulla

2 Ei saa käyttää uudelleen
 







Erinomainen puristusteho esimerkiksi väärtinävaltimeoon neulan poiston jälkeen

Hyvä puristusteho saavutetaan 9 mm paksun tyynyn ja laastarin elastisten ominaisuuksien ansiosta. Näin pistokohtaan muodostuu tehokas ja pysyvä kompressio.

■ Erittely

Tuotenumero	Koko			Laatikossa
	Laastarin koko	Tyynyn koko	Levyn koko	
4987167071660	40 x 120 mm	27 x 15 mm (paksuus 9 mm)	36 x 30 mm	30 arkkia

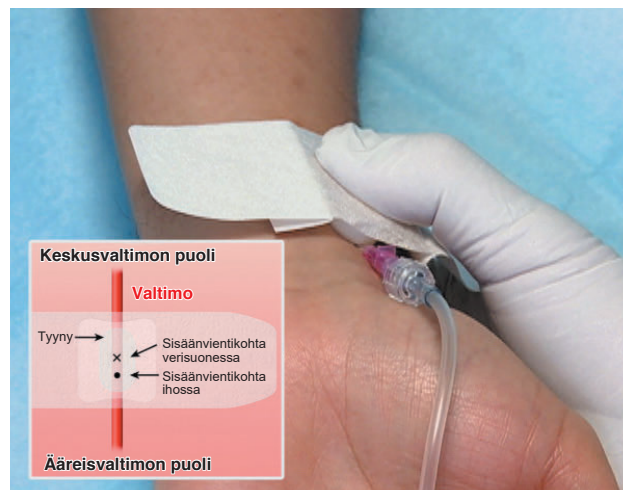



Kiinnitetyn STEPTYTMP -laastarin ja sen tuottaman puristustehon välinen suhde

Urethanikuitukangaslaastarin puristusteho kasvaa suhteessa kiinnitetyn laastarin pituuteen.

Noin 2 cm laastaria tyynyn kummallakin puolella tuottaa tehokkaan puristuksen (noin 100 mmHg) ja tunnin käytön jälkeen alkuperäisestä tehosta on jäljellä noin 70–80 %.

Ominaisuudet


- Tyyny, joka puristaa ihoa pehmeästi ja tehokkaasti.
- Muovinen levy, joka lisää puristustehoa ja turvallisuutta.
- Kaikkiin suuntiin joustava laastari, joka ylläpitää riittävää puristustehoa.
- Aikamerkintätarran avulla varmistetaan tuotteen oikean pituinen käyttöaika.
- Säästää hoitotyössä käytettyä aikaa.
- Laastarit ovat yksittäin pakattuja ja steriloitu etyleenioksidikaasulla.
- Soveltuu valtimopistosten jälkeen, joissa neulan koko on 14-24 G.

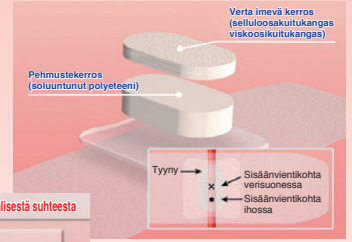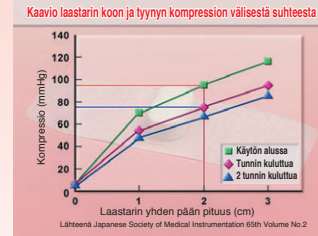

Käyttö


- Verenvuodon tyrehtyttämiseen tai pistokohdan suojaamiseen valtimopistoksen jälkeen.

Lämpökuvaa kämmenistä, kun STEPTYTMP on käytössä

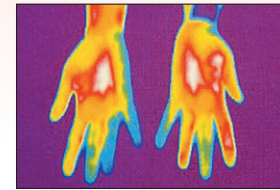

Kämmenten vertailu, kun toisessa kädessä on ollut STEPTYTMP kaksi tuntia ja toisessa tuotetta ei ole. Ihon pintalämpötiloissa ei havaita eroja, mikä osoittaa, että verenkierto ei heikkene.


Tuotteen käyttö

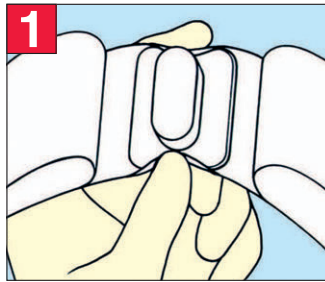


Avaa STEPTYTMP-pakkaus ja merkitse tyynyn sijainti taittamalla laastaria kevyesti sormenpäällä keskellä olevan levyn koverasta kohdasta.



Aseta tyyny siten, että se peittää sekä ihon että verisuonen lävistyskohdan. Vedä suoneen oleva neula ulos samalla, kun painat tyynyn päältä peukalolla. Kiinnitä STEPTYTMP vasta sen jälkeen, kun neula on poistettu.

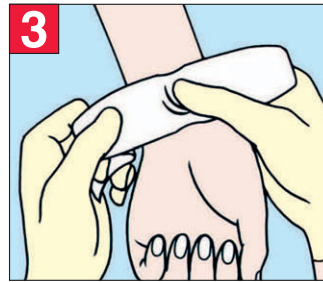

Kun olet poistanut neulan, purista tukipeukalolla tukevasti tyynyn päältä (taustapuolelta) ja irrota kyynärluun puoleinen suojapaperi osittain.

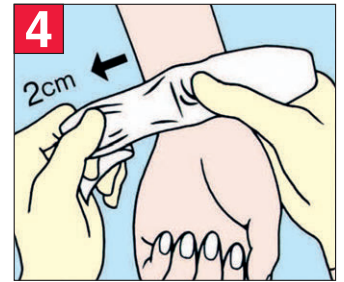


Purista tyynyä lujasti peukalolla samaan aikaan, kun venytät laastaria ja kiinnität sen tukevasti ihoon.



Purista tyynyä, pidä se paikallaan ja kiinnitä samalla laastari toisen peukalon avulla tukevasti ihoon.



Vaihda puristavan peukalon tilalle toinen peukalo. Huolehdi, että tyyny ei pääse liikkumaan ja jatka puristamista tasaisella puristusvoimalla.

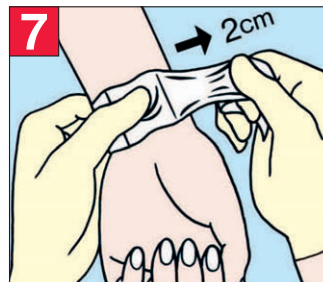

Paina tyynyä edelleen tukevasti ja irrota toisen puolen suojapaperi osittain. Kiinnitä laastaria noin 2 cm:n matkalta tukevasti ihoon. Irrota sen jälkeen koko suojapaperi ja kiinnitä laastari kokonaan.



Kirjoita tarraan laastarin kiinnitysaika ja kiinnitä tarra laastarin päälle (taustapuolelle). Verenvuoto loppuu yleensä noin 60 minuutin kuluttua STEPTYTMP:n kiinnittämisestä, mutta ajassa on yksilöllisiä eroja.

VAROTOIMET Tuotetta ei saa käyttää uudelleen

- Jos haavaan tulee tuotteen käytön aikana kliininen infektio, lopeta tuotteen käyttö ja hoida infektio.
- Jos esiintyy iho-oireita (esim. ihottumaa, kuumotusta tai kutinaa), lopeta tuotteen käyttö ja hoida oireet.
- Irrota neula aina ennen tuotteen kiinnittämistä, jotta iho tai verisuonet eivät vaurioiduisi.
- Painelaastarien pitkäkestoinen käyttö aiheuttaa liiallista jännitystä, mikä rasittaa ihoa.
- Suosittelemme painelaastarin poistamista 2 tunnin kuluttua sen asettamisesta.
- Laastarin irrottaa käytön jälkeen lääkäri tai hoitaja.
- Irrota laastari potilaan ollessa vuodelevossa. Tarkkaile potilasta muutaman minuutin ajan varmistaaksesi, että verenvuoto on loppunut.

- Jos puristusteho ei ole riittävä, ryhdy tarvittaviin toimenpiteisiin, esimerkiksi tyrehtyä verenvuoto puristamalla.
- Suojaa pistokohdasta ehkäistää neulan poiston jälkeisiä infektoita. Jos laastari kastuu tai likaantuu, irrota laastari viipymättä ja kiinnitä tilalle uusi.
- Jos tuotteen pakkaus vahingoittuu, hajoaa tai kastuu, älä käytä tuotetta.
- Tuote on käytettävä välittömästi pakkauksen avaamisen jälkeen.
- Ihovaurioiden välttämiseksi irrota laastari hitaasti ihokarvojen suuntaisesti.

Tuotteen säilytys

- Säilytetään huoneenlämmössä vedeltä, korkeilta lämpötiloilta, kosteudelta ja suoralta auringonvalolta suojattuna.