

Kirurgiskt mun- och nässkydd typ IIR, knytband

Mycket välpassande och andningsbart typ IIR mun- och nässkydd tillverkat av PP-fiberduk. Mun- och nässkyddet består av tre lager, innehåller formbar näsklämma och knyts bakom huvudet med knytbanden. Mun- och nässkyddet har hög filtreringskapacitet och uppfyller standardens SFS EN 14683: 2019 krav på filtreringseffektivitet. Hypoallergeniskt mun- och nässkydd är glasfiber-, doft-, nickel-, och latexfritt.

Avsedd användning

Medicin, skönhet, industri och andra branscher

Bruksanvisning



Tvätta eller desinfektera händerna innan du tar på dig ett rent mun- och nässkydd. Täck både näsa och mun och knyt fast mun- och nässkyddet bakom huvudet med hjälp av knytbanden. Rör inte mun- och nässkyddets yta förrän du har det på dig. Forma mun- och nässkyddet tätt vid näsryggen, så att näsan täcks och dra sedan skyddets nedre kant under hakan. Rör inte mun- och nässkyddet under användning. Tvätta händerna innan du tar av dig mun- och nässkyddet. Avlägsna skyddet, genom att dra isär knytbanden. Rör inte skyddets yta. Tvätta eller desinfektera händerna efter att du tagit av dig mun- och nässkyddet och kasta det använda skyddet.

Material

PP-fiberduk

Färg

Ljusblå och vit

Förvaringsinstruktioner

Förvaras torrt och skyddad från solljus. Förvaringstemperatur under 40°C. Luftfuktighet mindre än 80%.



Säkerhet

Mun- och nässkyddet är engångsbruk och efter användning kasseras med blandavfall.

Tillverkningsland

Kina

Importör

Berner Oy

Distributör i Sverige

Bröderna Berner AB, Berner Medical

Kirurgiskt mun- och nässkydd typ IIR, knytband ljusblå

Artikelnummer: 15841113
Avdelningsförpackning: 50 st

Kirurgiskt mun- och nässkydd typ IIR, knytband vit

Artikelnummer: 15842343
Avdelningsförpackning: 50 st

Kirurgiskt mun- och nässkydd typ IIR Soft, knytband, vit

Artikelnummer 15841116
Avdelningsförpackning: 50 st



20220224