

TOISTOKATETROINTIOPAS MIEHILLE





TOISTOKATETROINTIOPAS MIEHILLE

Hakemisto

TIETONI	4
ANATOMIA	5
MIKSI IQ CATH-KATETRI?	6
KATETRIN KÄYTTÖ : IQ2004	8
KATETRIN KÄYTTÖ : IQ2904	10
KATETRIN KÄYTTÖ : IQ2104	12
KATETRIN KÄYTTÖ : IQ2304	14
KATETRIN KÄYTTÖ : IQ3204	16
KATETRIN KÄYTTÖ : IQ4304	18
VIRTAUS- JA NESTELISTA.....	20
IQ CATH -KATETRIT	22
MUISTIINPANOJA.....	23



Berner Medical on terveydenhuollon ammattilaisten luotettava kumppani. Parannamme elämänlaatua tarjoamalla ratkaisuja ihmisen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn ylläpitämiseen. Palvelemme julkista ja yksityistä terveydenhuoltoa, hoivasektoria sekä ammattipuhtauteen erikoistuneita yrityksiä. Vahvuuksiamme ovat kattava tuotevalikoima, toimitusvarmuus, tuotekoulutus ja monialainen asiantuntijuus.

Rakko ei tyhjene, koska
.....
.....

Virtsarakko tulee tyhjentää katetroimalla kertaa vuorokaudessa

Hoitava lääkäri / uroterapeutti / sairaanhoitaja:
.....
.....


Uroterapeutin / sairaanhoitajan puh.numero:

Soittoaika:

Käytössäsi oleva IQ pisarakärikatetrin koko CH:

Katetrin tuotetunnus:

Muuta:
.....
.....
.....
.....

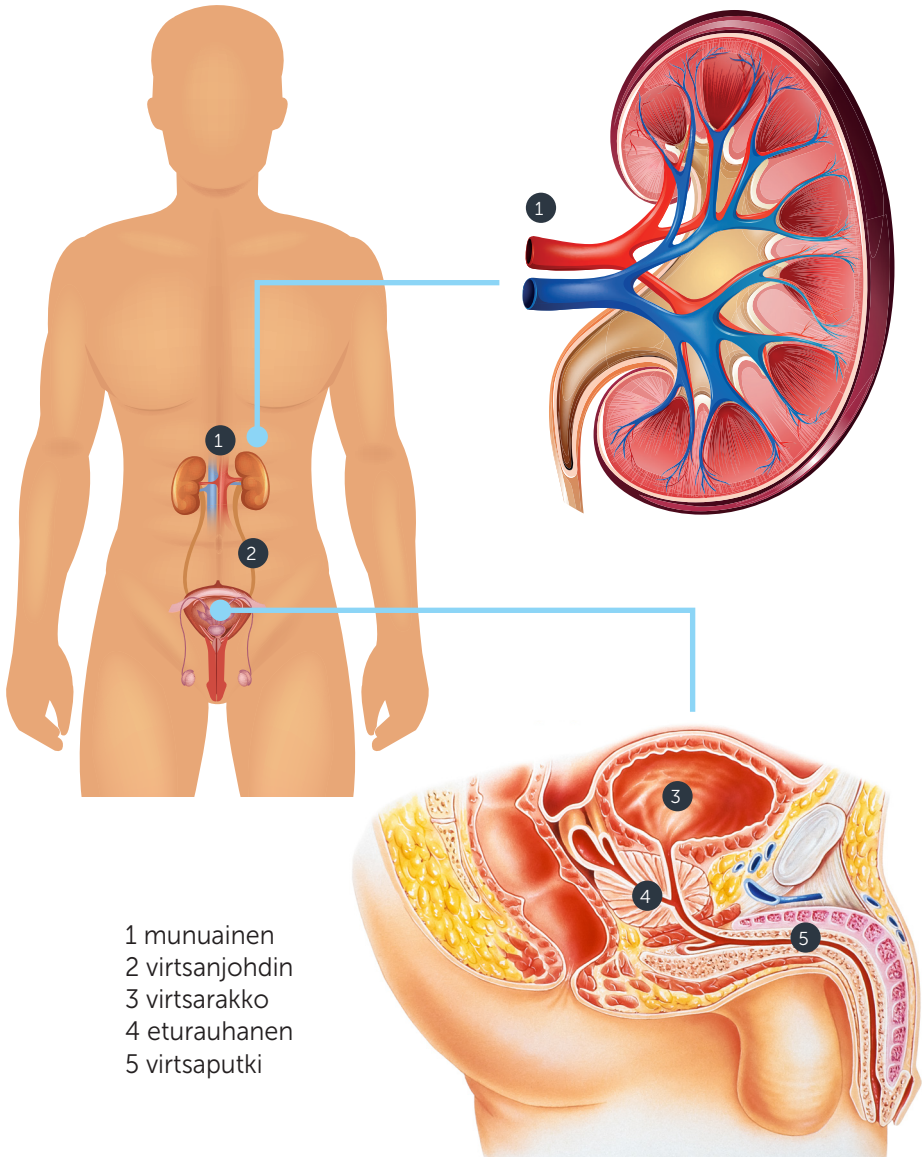


iqCATH

**Paras kärki, jonka voit koskaan saada!
Turvallinen ja varma kertakatetrointiin**



Pisarakärki

Ainutlaatuinen, patentoitu pisarakärki johtaa katetrin hellästi ja turvallisesti virtsaputken läpi.

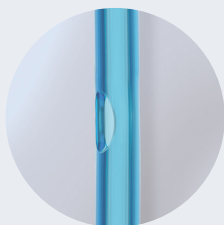

Pyöristetyt reiät

Katetrin kauttaaltaan pyöristetyt reiät estävät virtsaputken limakalvovaurioiden synnyn.






Taipuisa katetrin alkuosa

Pisarakärjen ja joustavan varren alkuosan johdosta IQ Cath kulkee kevyesti ja paine virtsaputken seinämää vasten on pieni.


Suurentunut eturauhanen tai spastinen sulki­jali­has tekevät katetrin kulun virtsarak­koon entistä vaikeammaksi.

Taskut virtsaput­kessa estävät katetrin vaivattoman kulun ja kohottavat riskiä saada vaurioita.

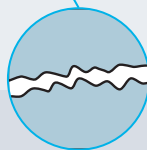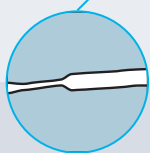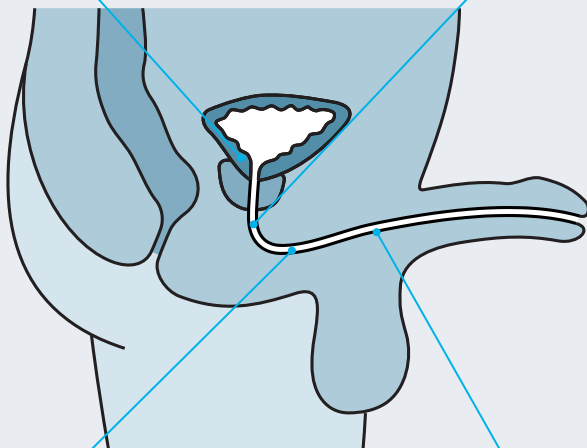


Ahtautumat voivat tehdä normaalin katetrin käytöstä mahdotonta.


Arpeumat virtsaput­ken seinämissä vaikeuttavat katetrin kulkua.

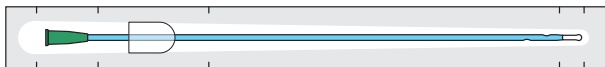

IQ2004 - Hydrofiilinen katetri ilman kostutusnestettä. Liukastamiseen käytetään 0,9 % suolaliuosta tai vettä. Noudata aina pakkauksen mukana tulevia käyttöohjeita.

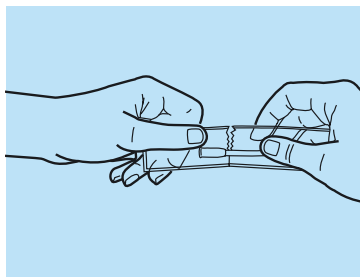


1. Avaa katetrin suojarahkaus.

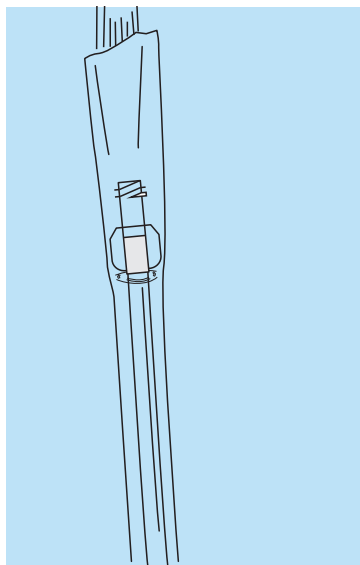


2. Täytä pakkaus vedellä, jonka jälkeen voit kiinnittää sen pakkauksessa olevan teipin avulla esim. lavuaarin reunaan.


3. Anna veden vaikuttaa 30 sekunnin ajan, minkä jälkeen katetri on valmis käytettäväksi.

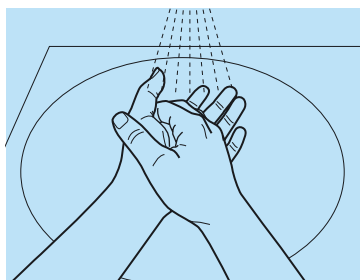


4. Jos mahdollista, yritä aina ensin virtsata.
5. Pese kädet saippualla ja vedellä. Alapesu kerran vuorokaudessa on riittävä.

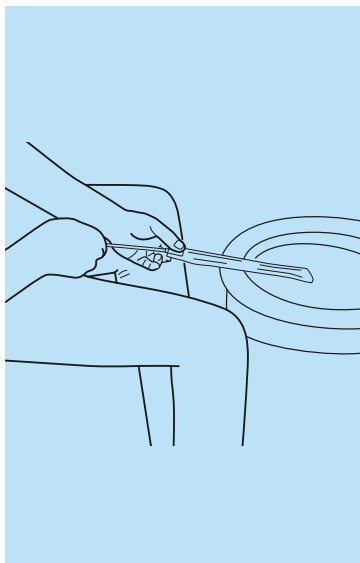

6. Katetroitaessa penis nostetaan viistosti ylöspäin. Työnnä katetri hitaasti virtsaputkeen. Katetri on rakossa, kun virtsa alkaa valua ulos katetrasta. Valuta virtsa WC-pönttöön ja tyhjennä rakko. Voit suorittaa katetroinnin istuen tai seisten.

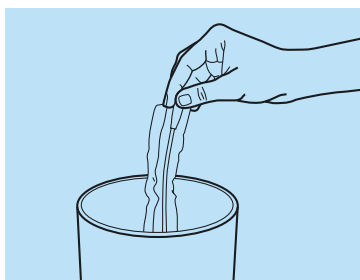


7. Kun virtsan tulo katetrasta loppuu, vedä katetri hitaasti pois virtsaputkesta.

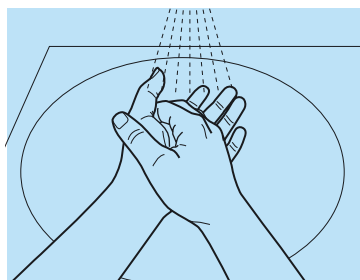


8. Hävitä katetri kotitalous-/energiajätteeseen.


9. Pese kädet.

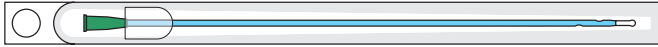


IQ2904 - Hydrofiilinen katetri ilman kostutusnestettä. Liukastamiseen käytetään 0,9 % suolaliuosta tai vettä. Päästä avattava pakkaus. Noudatta aina pakkauksen mukana tulevia käyttöohjeita.

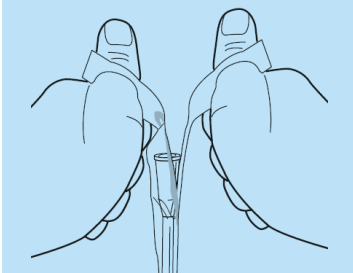


1. Avaa katetrin suojapakkaus.

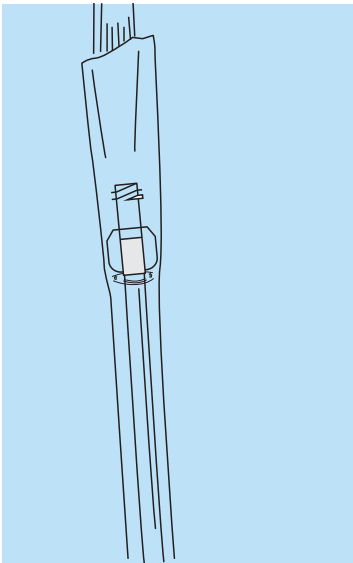


2. Täytä pakkaus vedellä, jonka jälkeen voit kiinnittää sen pakkauksessa olevan teipin avulla esim. lavuaarin reunaan.

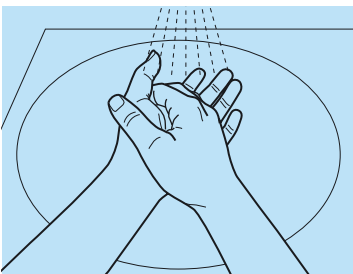

3. Anna veden vaikuttaa 30 sekunnin ajan, minkä jälkeen katetri on valmis käytettäväksi.
4. Jos mahdollista, yritä aina ensin virtsata.
5. Pese kädet saippualla ja vedellä. Alapesu kerran vuorokaudessa on riittävä.

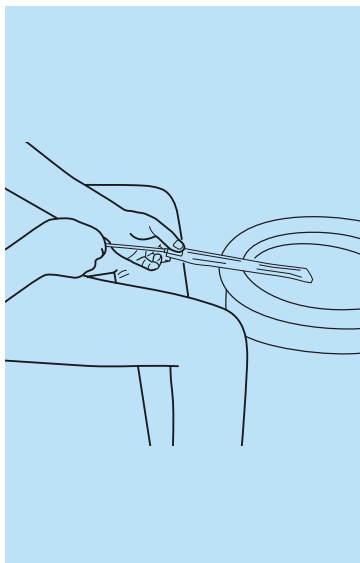


6. Katetroitaessa penis nostetaan viistosti ylöspäin. Työnnä katetri hitaasti virtsaputkeen. Katetri on rakossa, kun virtsa alkaa valua ulos katetrasta. Valuta virtsa WC-pönttöön ja tyhjennä rakko. Voit suorittaa katetroinnin istuen tai seisten.

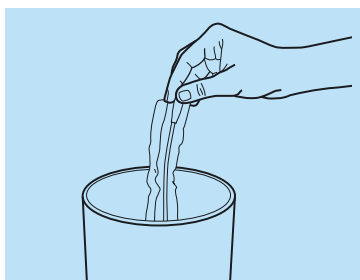

7. Kun virtsan tulo katetrasta loppuu, vedä katetri hitaasti pois virtsaputkesta.


8. Hävitä katetri kotitalous-/energiajätteeseen.

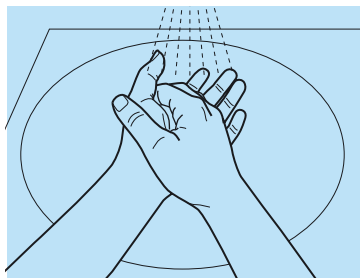

9. Pese kädet.




IQ2104 - Hydrofiilinen katetri, jossa integroituna 0,9 % -suolaliuospussi katetrin liukastamista varten. Noudata aina pakkauksen mukana tulevia käyttöohjeita.

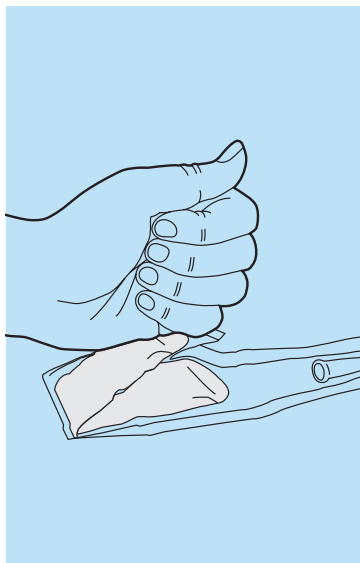


1. Valmistele katetri käyttövalmiiksi. Purista ja rullaa neste-pussia niin, että neste valuu katetripakkaukseen. Varmista, että pussin sisältö tyhjentyy kokonaan.
2. Anna nesteen vaikuttaa 30 sekunnin ajan, minkä jälkeen katetri on valmis käytettäväksi.


Voit halutessasi kiinnittää katetripakkauksen teipin avulla esim. lavuaarin reunaan.

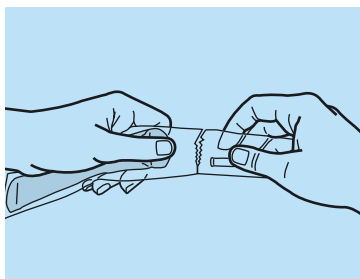


3. Avaa katetrin suojapakkaus.

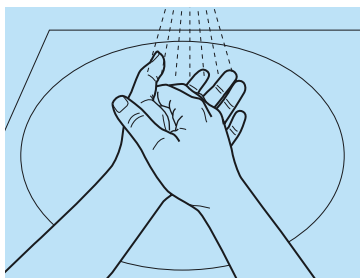


4. Jos mahdollista, yritä aina ensin virtsata.
5. Pese kädet saippualla ja vedellä. Alapesu kerran vuorokaudessa on riittävä.

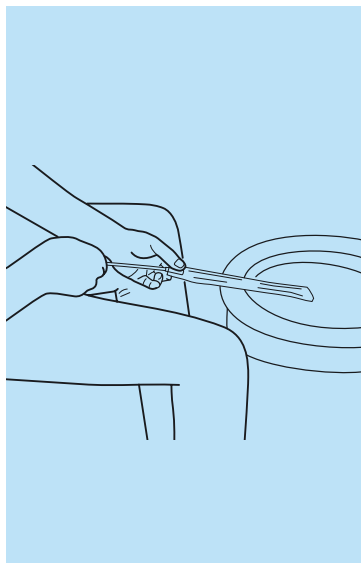

6. Katetroitaessa penis nostetaan viistosti ylöspäin. Työnnä katetri hitaasti virtsaputkeen. Katetri on rakossa, kun virtsa alkaa valua ulos katetrasta. Valuta virtsa WC-pönttöön ja tyhjennä rakko. Voit suorittaa katetroinnin istuen tai seisten.

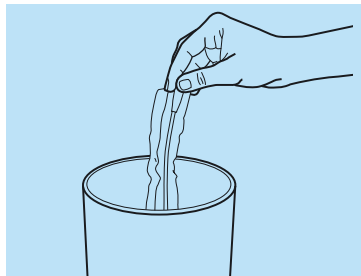


7. Kun virtsan tulo katetrasta loppuu, vedä katetri hitaasti pois virtsaputkesta.

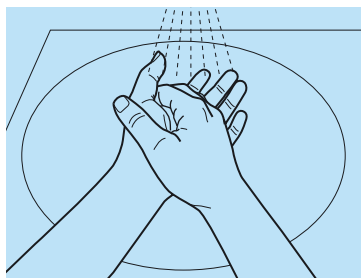


8. Hävitä katetri kotitalous-/energiajätteeseen.


9. Pese kädet.

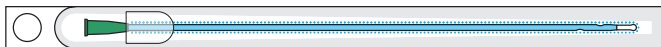

IQ2304 - Heti valmis hydrofiilinen katetri, joka on 0,9% suolaliuoksessa. Päästä avattava pakkaus. Noudata aina pakkauksen mukana tulevia käyttöohjeita.

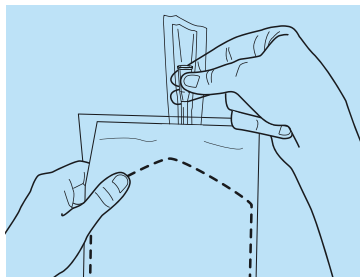


1. Avaa foliopakkaus. Varmista, että neste peittää tasaisesti koko katetrin pinnan. Katetri on heti valmis käytettäväksi.

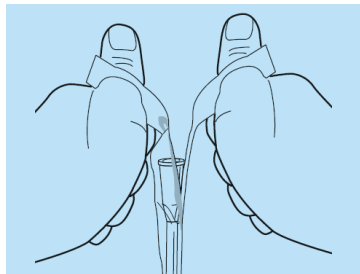


2. Avaa katetrin suojapakkaus.

Voit halutessasi kiinnittää katetripakkauksen teipin avulla esim. lavuaarin reunaan.

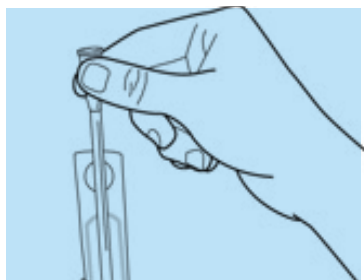


3. Jos mahdollista, yritä aina ensin virtsata.

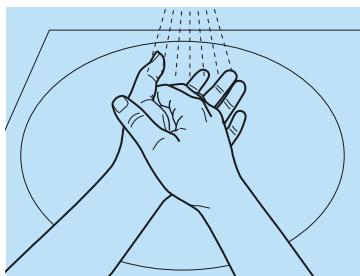


4. Pese kädet saippualla ja vedellä. Alapesu kerran vuorokaudessa on riittävä.

HUOM! IQ2304.XX-katetrit on pakattu erilliseen folioon 10 kpl erissä. Katetrien käyttöaika folion avaamisen jälkeen on 30 päivää pakkauksessa olevan nesteen kuivumisen välttämiseksi. Ennen käyttöä pitää varmistaa, että katetripakkauksessa on riittävä määrä nestettä.

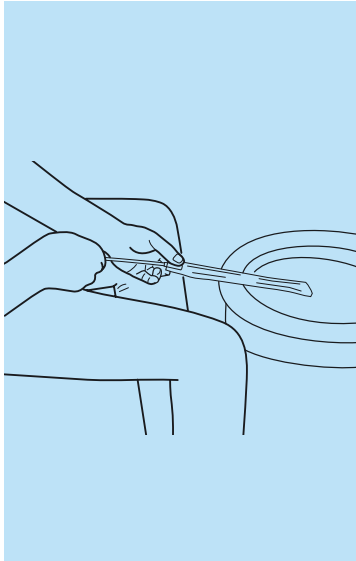


5. Katetroitaessa penis nostetaan viistosti ylöspäin. Työnä katetri hitaasti virtsaputkeen. Katetri on rakossa, kun virtsa alkaa valua ulos katetrasta. Valuta virtsa WC-pönttöön ja tyhjennä rakko. Voit suorittaa katetroinnin istuen tai seisten.

6. Kun virtsan tulo katetrasta loppuu, vedä katetri hitaasti pois virtsaputkesta.

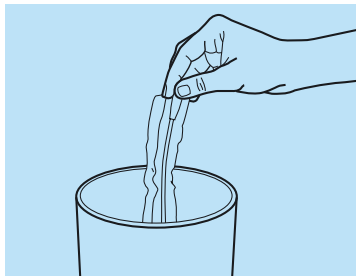


7. Hävitä katetri kotitalous-/energiajätteeseen.

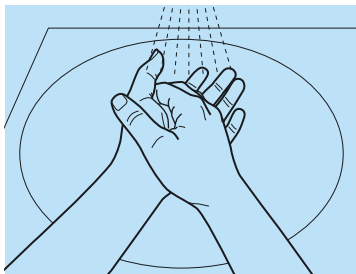


8. Pese kädet.



IQ3204 - Heti valmis katetri, jonka ympärillä pakkauksessa on vesipohjainen geeliliukaste. Noudata aina pakkauksen mukana tulevia käyttöohjeita.

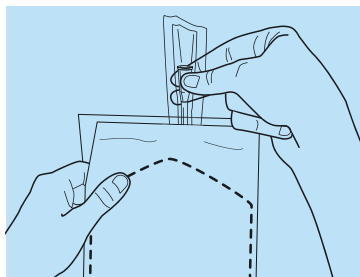


1. Avaa foliopakkaus. Varmista, että geeliliukaste peittää tasaisesti koko katetrin pinnan. Tarvittaessa levitä geeliä suojapakkauksen läpi katetrin pintaan. Katetri on heti valmis käytettäväksi.

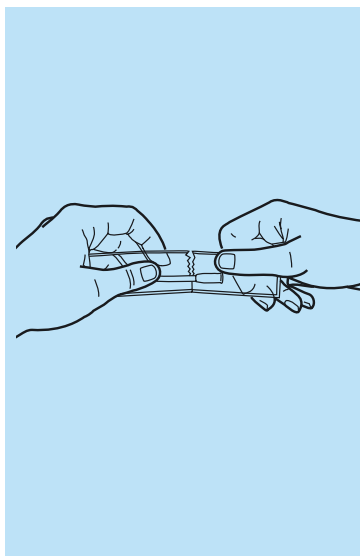


2. Avaa katetrin suojapakkaus.

Voit halutessasi kiinnittää katetripakkauksen teipin avulla esim. lavuaarin reunaan.

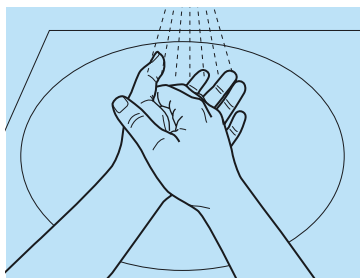


3. Jos mahdollista, yritä aina ensin virtsata.
4. Pese kädet saippualla ja vedellä. Alapesu kerran vuorokaudessa on riittävä.

HUOM! IQ3204.XX-katetrit on pakattu erilliseen folioon 10 kpl erissä. Katetrien käyttöaika folion avaamisen jälkeen on 20 päivää pakkauksessa olevan nesteen kuivumisen välttämiseksi. Ennen käyttöä pitää varmistaa, että katetripakkauksessa on riittävä määrä nestettä.

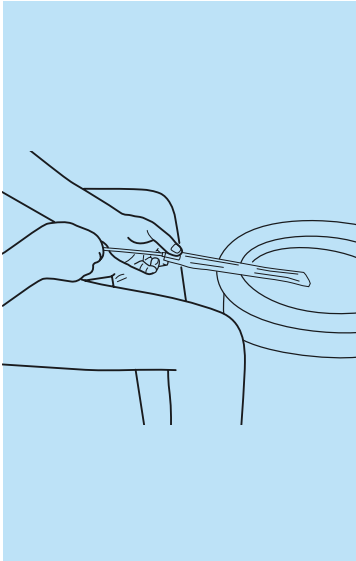


5. Katetroitaessa penis nostetaan viistosti ylöspäin. Työnä katetri hitaasti virtsaputkeen. Katetri on rakossa, kun virtsa alkaa valua ulos katetrasta. Valuta virtsa WC-pönttöön ja tyhjennä rakko. Voit suorittaa katetroinnin istuen tai seisten.

6. Kun virtsan tulo katetrasta loppuu, vedä katetri hitaasti pois virtsaputkesta.

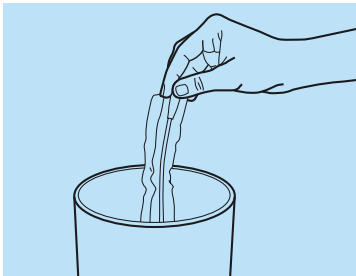


7. Hävitä katetri kotitalous-/energiajätteeseen.

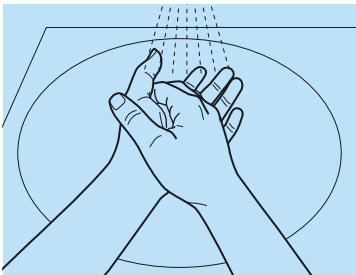


8. Pese kädet.



IQ4304 - hetivalmis hydrofiilinen katetri hygieniasuojalla, joka on 0,9% suolaliuoksessa. Päästä avattava pakkaus. Noudata aina pakkauksen mukana tulevia käyttöohjeita.

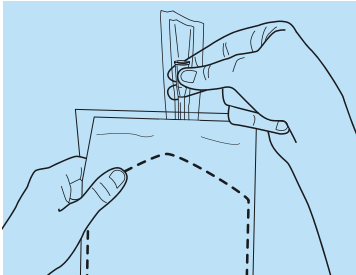



1. Avaa foliopakkaus. Varmista, että neste peittää tasaisesti koko katetrin pinnan. Katetri on heti valmis käytettäväksi

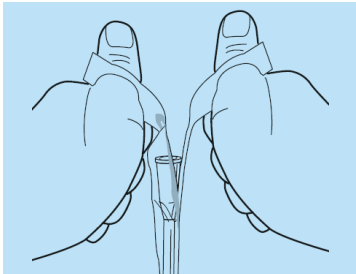

2. Avaa katetrin suojapakkaus.


Hygieniasuoja peittää katetrin kokonaan ja mahdollistaa sisäänviennin ilman katetriin koskemista.

Voit halutessasi kiinnittää katetripakkauksen teipin avulla esim. lavuaarin reunaan.

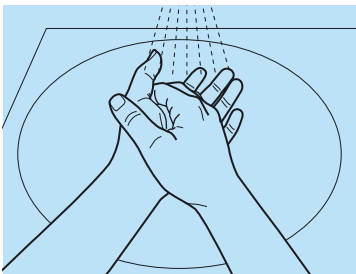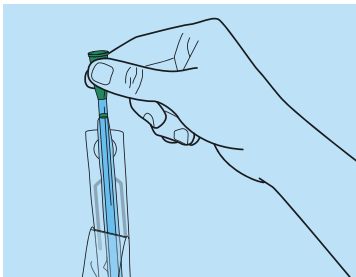


3. Jos mahdollista, yritä aina ensin virtsata.
4. Pese kädet saippualla ja vedellä. Alapesu kerran vuorokaudessa on riittävä.

HUOM! IQ4304.XX-katetrit on pakattu erilliseen folioon 10 kpl erissä. Katetrien käyttöaika folion avaamisen jälkeen on 30 päivää pakkauksessa olevan nesteen kuivumisen välttämiseksi. Ennen käyttöä pitää varmistaa, että katetripakkauksessa on riittävä määrä nestettä.

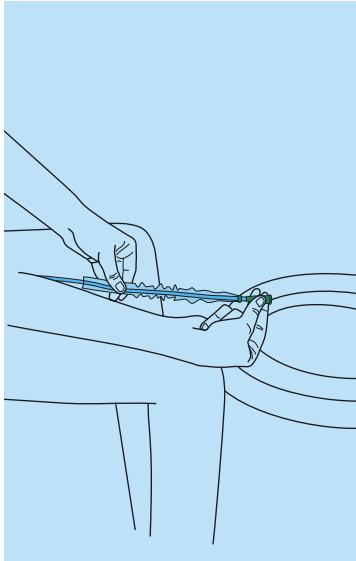


5. Katetroitaessa penis nostetaan viistosti ylöspäin. Hygieniasuoja ja katetrin ympärillä mahdollistaa sisäänviennin ilman katetriin koskemista. Työnnä katetri hitaasti virtsaputkeen, samalla hygieniasuoja rullautuu katetrin päällä kohti liitinosa. Katetri on rakossa, kun virtsa alkaa valua ulos katetrasta. Valuta virtsa WC-pönttöön ja tyhjennä rakko. Voit suorittaa katetroinnin istuen tai seisten.

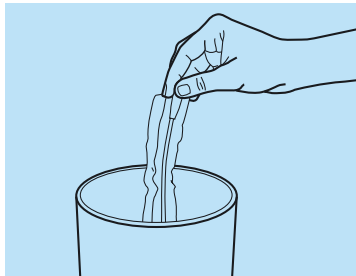

6. Kun virtsan tulo katetrasta loppuu, vedä katetri hitaasti pois virtsaputkesta.

7. Hävitä katetri kotitalous-/energiajätteeseen.

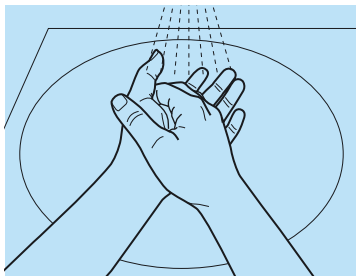

8. Pese kädet.

Päivämäärä ja kellonaika	Nautittu nestemäärä (dl)	Katetroitu virtsan määrä (ml)	Spontaani virtsaus (+ / -)

IQ CATH -KATETRIT	CH 10	CH 12	CH 14	CH 16	CH 18
IQ2004 Hydrofiilinen katetri ilman kostutusnestettä	2004.10	2004.12	2004.14	2004.16	
IQ2904 Hydrofiilinen katetri ilman kostutusnestettä. Päästä avattava pakkaus.	2904.10	2904.12	2904.14	2904.16	2904.18
IQ2104 Hydrofiilinen katetri, jossa integroituna 0,9%-suolaliuos pussi katetrin liukastamista varten	2104.10	2104.12	2104.14	2104.16	2104.18
IQ2304 Hydrofiilinen heti valmis katetri, joka on 0,9% keittosuolaliuoksessa	2304.10	2304.12	2304.14	2304.16	2304.18
IQ3204 Heti valmis katetri, jonka ympärillä on vesi-pohjainen geeliliukaste.	3204.10	3204.12	3204.14	3204.16	3204.18
IQ4304 Hydrofiilinen heti valmis katetri hygieniasuojalla, joka on 0,9% keittosuolaliuoksessa.	4304.10	4304.12	4304.14	4304.16	4304.18

Pakkauskoko 30 kpl/ltk. Miesten katetrin pituus 40 cm

[illegible]



HUOMISEN PUOLUSTAJA

Yli 100 vuoden
kokemuksella

Berner Oy

<https://www.bernermedlab.fi/>

medlab@berner.fi

020 791 00 (vaihde)