

Laitteen käyttöönotto

Kansi avataan kiertämällä katkaisinta vastapäivään (Mukana neljä eriväristä kantta). Läpinäkyvän kannen alle voidaan laittaa kuvia tai tekstiä, se irtaoo nostamalla kannen ollessa kiinnitettynä. Laite toimii 9-voltin paristolla, jonka paikka on laitteen pohjassa, suojakannen alla. Laitteeseen kytketään virta pyörittämällä äänenvoimakkuuden säädintä oikealle kunnes se naksahtaa.

Viestin äänittäminen

- Paina RECORD-painike pohjaan ja odota kunnes sen yläpuolelle syttyy valo.
- Aloittaaksesi äänityksen paina laitteen päällä oleva kytkin pohjaan ja odota kunnes kuulet piip-äänien. Vapauta painike kun olet valmis. Pidä kaiutin itseesi päin suunnattuna koko äänityksen ajan.
- Toista äskeinen kohta äänittääksesi lisää viestejä sarjaan.
- Äänitystilasta poistuminen tapahtuu painamalla RECORD-painiketta kerran.

Laitteessa on neljän (4) minuutin kokonaisäänitysaika.

Viestin toistaminen

Paina laitteen päällä olevaa painiketta toistaaksesi äänitetyn viestin, sarjan seuraava viesti toistuu painamalla painiketta uudelleen. Laitteeseen on myös mahdollista liittää ulkoinen painike.

Liittimet

Toy/Appliance-liittimeen on mahdollista liittää paristokäyttöinen lelu tai laite, joka toimii samaan aikaan kun viesti toistetaan. Ulkoinen painike voidaan liittää takaa löytyvään SWITCH-liittimeen.