

Steri5

Puuvillasuodattimet



Steri5 puuvillasuodattimet ovat kehitetty edistämään steriilien suodattimien henkilökohtaista kertakäyttöä ja vähentämään bakteerikontaminaation sekä virustartunnan (HIV, hepatiitti C) riskiä. Pienen kokonsa ansiosta Steri5 puuvillasuodattimet säilyttävät vähemmän lääkeainetta esimerkiksi tupakansuodattimiin verrattuna. Lisäksi Steri5 puuvillasuodattimien korkea tiheys takaa paremman suodatustehokkuuden.

Pakkauskoko

5 kpl/pkt
500 pkt/ltk (2 500 puuvillasuodatinta)

Materiaali

Puuvilla

Väri

Valkoinen

Käyttökohde

Huumausaineiden käyttöön liittyvien yhteiskunnallisten terveyshaittojen vähentäminen.

Käyttöohjeet

Avaa läpipainopakkaus varovasti ja varo, etteivät puuvillasuodattimet putoa ulos pakkauksesta. Pidä kiinni pakkauksesta ja pudota ulos pakkauksesta puuvillasuodatin, jota aiot käyttää. Puuvillasuodatin tulee pudottaa suoraan klippikuppiin koskettamatta puuvillasuodatinta. Varmista samalla, ettei loput puuvillasuodattimet putoa ulos pakkauksesta. Sulje läpipainopakkaus varovasti esim. taittamalla, jotta jäljelle jääneet puuvillasuodattimet säilyvät mahdollisimman puhtaina.

Turvallisuus

Älä koske puuvillasuodattimeen käsilläsi tai käytä uudelleen puuvillasuodattimia.

Varastointiohjeet

Säilytettävä kuivassa ja suojassa auringon valolta.

Jakelija

Berner Oy

Steri5 puuvillasuodattimet

Tuotenumero: AP02-003-00

Myyntierä: 1 ltk

20220623



Käytössä huomioitavaa

Vasta-aiheet

- Iskeemiset haavat ennen tehokasta revaskularisaatiota
- Kasvaimiin liittyvät, neoplastiset haavat
- Taustalla avaamista vaativa paise tai faskiitti
- Taustalla osteomyeliitti
- Allergia tai intoleranssi mille tahansa valmisteeseen ainesosalle
- Debrichemin turvallisuutta ja tehoa ei ole tutkittu lasten tai nuorten hoidossa eikä raskaana olevilla tai imettävillä naisilla. Näiden potilaiden kohdalla tulisi harkita muita vaihtoehtoja haavan puhdistamiseksi.

Varotoimet ja varoitukset

- Käytä suojalaseja DEBRICHEM- valmisteeseen käytön aikana.
- Käytä suojakäsineitä (nitriili, polyeteeni tai polypropeeni).
- Älä jätä tuotetta haavalle yli 60 sekunniksi.
- Terveystuotteen ammattilaisen on varmistettava limakalvojen, kasvojen ja uusiutuvien kudosten riittävä suojaaminen tuotteelle altistumiselta, kun tuotetta käytetään niiden läheisyydessä.
- Käytä aina liinoja ihon suojaukseen.
- Puhdista haava perusteellisesti kaikista aiemmin käytetyistä aineista ja valmisteista.
- Tuote on käytettävä pullon avaamisen jälkeen, käyttämättä jäänyt liuos on hävitettävä.
- Alan kirjallisuudessa on esiintynyt satunnaisia selvityksiä, joiden mukaan happamat paikalliset haavanpuhdistusaineet voivat viivästyttää haavan paranemista.
- DEBRICHEM-valmiste on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön.
- Älä käytä tuotetta, jos pakkaus on avattu tai sinetti on rikottu.
- Ihoa ja silmiä syövyttävä, huuhtelee välittömästi
- Ärsyttävä

Haittavaikutukset

- Potilaat, joilla ei ole sensorista neuropatiaa, voivat tuotteen levityksen yhteydessä kokea polttelun tai pistelyn tuntemuksia. Nämä oireet häviävät yleensä muutaman minuutin kuluessa. Paikalliskipulääkettä voidaan käyttää terveydenhuollon ammattilaisen arvion mukaisesti ennen DEBRICHEM-valmisteen käyttöä.
- Punoitus, turvotus, ihoärsytys, eryteema, ensimmäisen asteen palovamma.

Yleiset turvallisuusohjeet

Vain ulkoiseen käyttöön. Älä käytä infuusioon tai injektioon. Älä niele. Jos tuotteelle altistutaan tahattomasti, huuhtelee aine välittömästi pois vedellä. Älä käytä potilailla, jotka ovat allergisia mille tahansa ainesosalle. Älä käytä raskaana olevilla tai imettävillä potilailla.