

# Sterifilt

Sterifilt+ on **ensimmäinen antibakteerinen suodatin**, joka on suunniteltu vähentämään huumaus- ja lääkeaineiden pistoskäyttöön liittyviä haittoja.

Sterifilt+ tarjoaa **tehokkaimman suodatuksen** suurimmalle käyttäjämäärälle.

## Innovaatiolla saavutetaan kolme tavoitetta:


1. Bakteerien ja sienten poistaminen.
2. Liukenemattomien hiukkasten poistaminen.
3. Nopea ja helppo yksivaiheinen suodatus.

Suodatettu liuos, joka sisältää vaikuttavaa ainetta

Kalvo ja rei'itetty suojaosa

Suodattamaton liuos

**STERIILI JA  
KERTAKÄYTTÖINEN  
STERIFILT+ SOPII  
KAIKKIIN RUISKUIHIN**

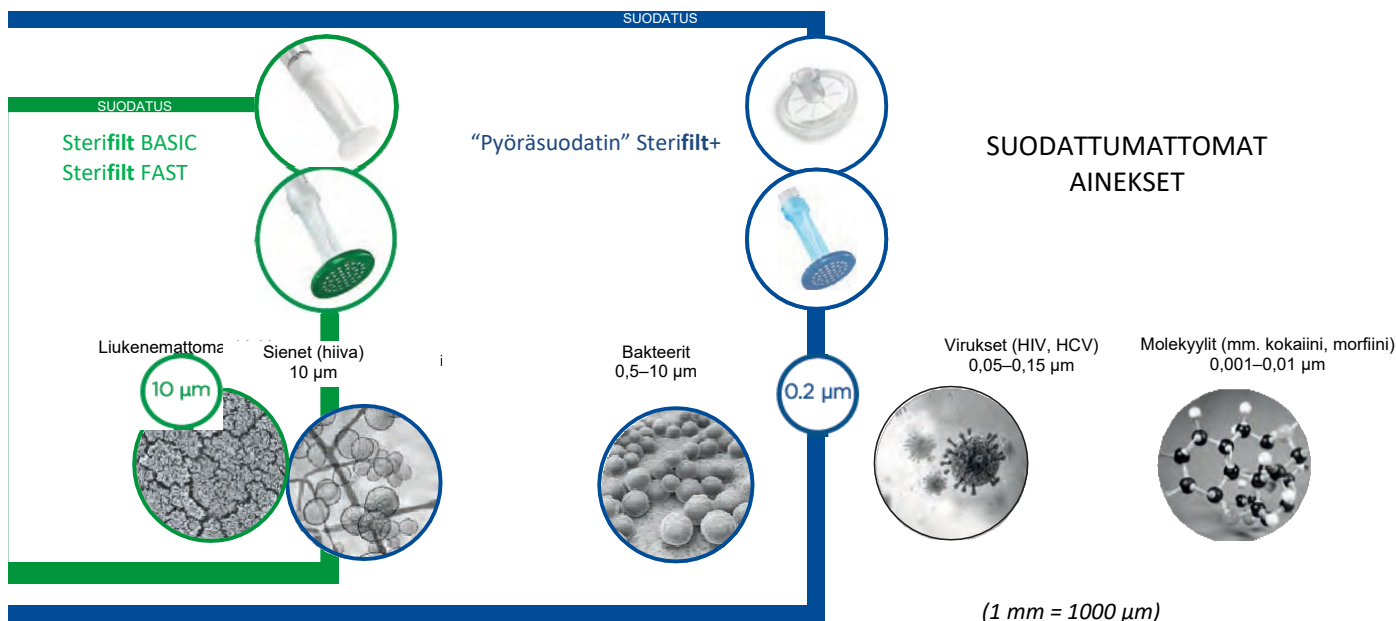

### 1 BAKTEERIEN JA SIENTEN POISTAMINEN

- Pistettävä sekoitus saattaa olla elävien **mikrobien**, kuten bakteerien ja sienten, kontaminoima. Kontaminaatiolla on erilaisia lähteitä:
  - **likaiset kädet**,
  - **ei-steriilit valmistusvälineet tai vesi**,
  - itse huumaus- tai lääkeaineen kontaminaatio
- Mikrobit saattavat kulkeutua pistoksen mukana elimiin (sepsis) ja aiheuttaa mahdollisesti vakavia **infektioita** erityisesti keuhkoissa, luissa, aivoissa ja sydämessä.
- Sterifilt+ :ssä on **0,22 µm**:n paksuinen antibakteerinen kalvo, joka poistaa yli **99,9 % bakteereista ja sienistä**.

1

2

### 2 LIUKENEMATTOMIEN HIUKKASTEN POISTAMINEN

- Sterifilt BASICin ja FASTin tavoin Sterifilt+ poistaa lähes kaikki liukenemattomat hiukkaset, kuten katuhuumeiden **laimennusaineet** sekä tablettien ja kapselien **apuaineet**.
- Tällaisten hiukkasten pistäminen voi aiheuttaa erilaisia komplikaatioita erityisesti pistoskohdassa (paiseet, haavaumat). Pistämisen jälkeen osa hiukkasista kulkeutuu ehjänä verenkiertoon ja saattaa **tukkia kapeimmat verisuonet**, kuten keuhkojen hiusuonet, joihin ne todennäköisesti kasautuvat.

3

### 3 AINOA ANTIBAKTEERINEN SUODATIN HUUMAUS- JA LÄÄKEAINEITA PISTÄVILLE

- Sterifilt+ mahdollistaa nopean ja **yksivaiheisen** suodatuksen.
- Se **sopii yleisimpiin ruiskuihin**, sekä kiinteäneulaisiin (pieni kuollut tila) että neulattomiin, Luer-liukukärkisiin ruiskuihin. Kiinteäneulaiset ruiskut vähentävät viruksen leviämisenriskiä neulanvaihdon tai vahingossa tapahtuvan jakamisen yhteydessä.
- Sen avulla sekä **jauheet että tabletit ja kapselit voi suodattaa nopeasti**.
- Se ei poista vaikuttavia molekyylejä **eikä vaikuta pistoksen toivottuun vaikutukseen**.
- Kahdeksassa neulanvaihto-ohjelmassa vuosina 2020–2021 toteutettu tutkimus osoitti, että Sterifilt+ on käyttäjille mieluisa tuote.

### VÄHENNÄ RISKITEKIJÖITÄ

### ANTIBAKTEERINEN SUODATUS ON TÄRKEÄ, JOSKAAN EI RIITTÄVÄ TOIMENPIDE!

- Valtaosa huumeiden pistoskäyttöön liittyvistä bakteeri- tai sieni-**infektioista** on **iholla ja suussa esiintyvien** bakteereiden tai sienten aiheuttamia.
- Sterifilt+ :n käyttämisen lisäksi on suositeltavaa käyttää **steriilejä välineitä, pestä kädet, desinfioida pistoskohta ja olla nuolematta neulaa**.

YKSIKÄÄN SUODATIN EI POISTA VIRUKSIA: AINOA TAPA ESTÄÄ VIRUSTEN LEVIÄMINEN ON KÄYTTÄÄ VAIN OMIA VÄLINEITÄ.