


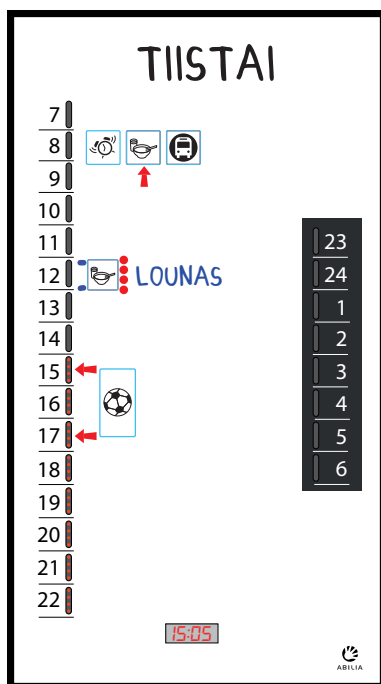

MEMO Dayboard

Käyttöohje

Art. nr: 508820 508825


Sisällysluettelo

Johdanto	4
Tietoja MEMO Dayboard	4
Käyttötarkoitus	4
Tietoja tästä asiakirjasta	5
Tuotetta MEMO Dayboard koskeva yleiskatsaus	6
Mukana toimitetut osat	6
Sisältyvät asiakirjat	6
Aloita tuotteen MEMO Dayboard käyttö	7
Kiinnitä MEMO Dayboard seinälle	7
Käynnistä MEMO Dayboard	8
Aseta päivä ja aika	8
Mukauta MEMO Dayboard	8
Käytä tuotetta MEMO Dayboard	9
Näytä päivä, viikonpäivä ja kuukausi	10
Näytä tapahtumat ja tehtävät	10
Herätysten asettaminen	12
Aseta lukitustila	16
Muuta kirkkausasetuksia	17
Muuta yleisiä asetuksia	18
Säädä päivä- ja yöaika tunteina	19
Piilota taulun osat	19
Käytä nimellä 12 tunnin versio	20
Huolto	21
Puhdista MEMO Dayboard	21
Palauta tehdasasetukset	21
Varastointi ja hävittäminen	21
Vianetsintä	22
Tuotetiedot	23
MEMO Dayboard	23
Lisätarvikkeet	23
Tärkeää tietoa	24
Yhteystiedot	27


Johdanto

Tietoja MEMO Dayboard

MEMO Dayboard on suunnittelutaulu, joka tukee niitä, jotka tarvitsevat visuaalisen yleiskuvan päivästä. Siinä on magneettinen valkotaulu ja kaksi pylvästä: yksi, jossa on punaiset valot päivää varten ja yksi, jossa on siniset valot yötä varten. Värien avulla on helppo nähdä, onko kyseessä päivä vai yö. Kun lisää tauluun esimerkiksi kirjoitettua tekstiä tai kuvia, saat yleiskuvan päivästä. Tehtävän alkamiselle voi asettaa muistutuksen.

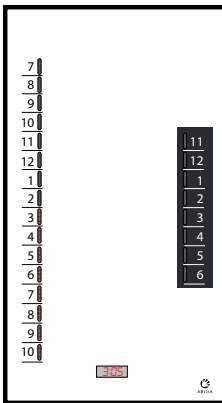

MEMO Dayboard 12 tunnin versio

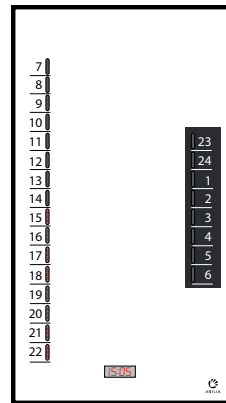

MEMO Dayboard 24 tunnin versio

Saatavana on eri lisävarusteita MEMO Dayboard -laitteelle, esimerkiksi *Table stand*, *Lockable door* ja *Adaptation set* varustettuna magneeteilla. Katso *Lisätarvikkeet* sivulla 23.

Käyttötarkoitus


MEMO Dayboard on suunnittelutaulu, jonka tarkoituksena on tukea ihmisiä, jotka tarvitsevat visuaalisen yleiskuvan päivästä ajan kulumisen mukaan. Se sopii lapsille, aikuisille ja vanhuksille, joiden ajanhallintakyky on rajallinen. Esimerkiksi henkilöt, joilla on aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD/ADD), autismi, varhainen dementia ja lievä tai keskivaikea älyllinen kehitysvamma.

Tämä tuote on tarkoitettu sisäkäyttöön koti-, koulu- tai työympäristössä.

Tietoja tästä asiakirjasta

Tämä käyttöohje on tarkoitettu tukihenkilöille. Tässä asiakirjassa annetaan ohjeet, miten määrität MEMO Dayboard -laitteen ja muutat eri asetukset turvallisesti käyttäjälle sopiviksi.

Tuotetta MEMO Dayboard koskeva yleiskatsaus

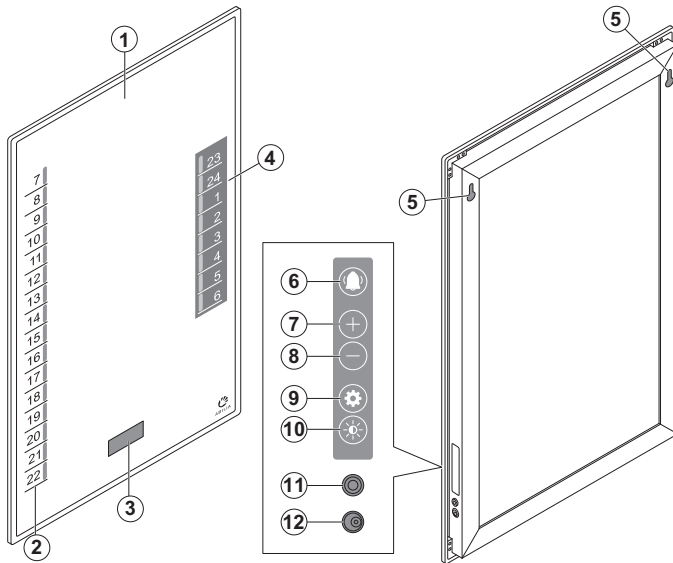

1. Magneettinen valkotaulu
2. Aikapylväs, päivä
3. Digitaalinen kello
4. Aikapylväs, yö
5. Kiinnitysreiät

Sivupaneeli:

6. Hälytysasetusten painike
7. + -painike
8. - -painike
9. Yleisten asetusten painike
10. Kirkkauden asetuspainike
11. Ohjauspainikkeen liitin
12. Virtaliitin

Mukana toimitetut osat

- MEMO Dayboard
- Power Supply
- 3 valkotaulun kynää
- Mikrokuituliina
- Porausreiän mallinne
- Ruuvit ja seinätulpat


Sisältyvät asiakirjat

- Käyttöohje (tämä asiakirja)
- Pikaopas


Aloita tuotteen MEMO Dayboard käyttö

Kiinnitä MEMO Dayboard seinälle


Ennen kuin kiinnität MEMO Dayboard:n seinälle, varmista, että käsilläsi on seuraavat työkalut ja mukaan sisältyvät osat:

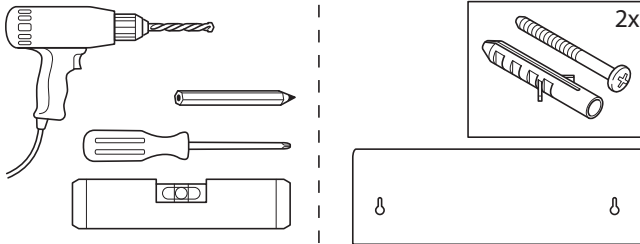


VAROITUS: Kiinnitä MEMO Dayboard oikein. Virheellinen asennus voi aiheuttaa loukkaantumisen tai laitteen vaurioitumisen.

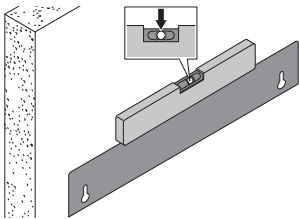


1. Aseta porareian mallinne vaakatasoon.

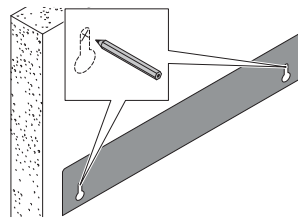


2. Merkitse porausreiät.

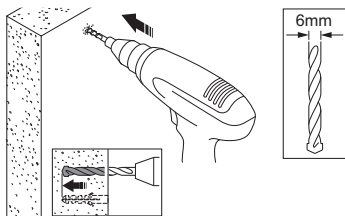

3. Poraat reiät.

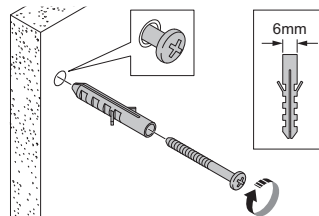

4. Asenna seinätulpat ja ruuvit.

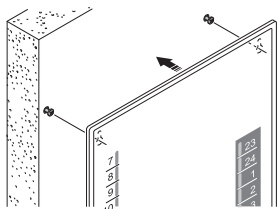

5. Ripusta MEMO Dayboard seinälle ripustusrei'istä.




KÄRKI: Voit käyttää pöytätelinettä myös silloin, kun et halua MEMO Dayboard ripustaa sitä seinälle. Katso Lisätarvikkeet sivulla 23.


Käynnistä MEMO Dayboard



VAROITUS: Käytä ainoastaan MEMO Dayboard -laitteen mukana tullutta alkuperäistä muuntajaa.

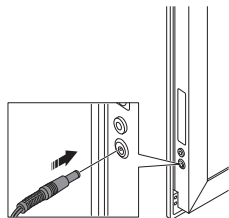

1. Kytke liitin MEMO Dayboard -laitteeseen.

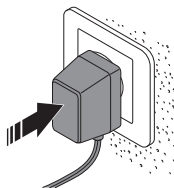

2. Kytke virtalähde pistorasiaan.

Aseta päivä ja aika

Varmista, että päivämäärä- ja kellonaika-asetukset ovat oikein. Katso kohta *Muuta yleisiä asetuksia* sivulla 18.

Mukauta MEMO Dayboard

Jotta MEMO Dayboard -laitteesta on mahdollisimman paljon hyötyä, suosittelemme, että mukautat asetukset käyttäjän tarpeiden mukaan, katso kohta *Käytä tuotetta MEMO Dayboard* sivulla 9.

Käytä tuotetta MEMO Dayboard

Jotkin seuraavista ohjeista käyttävät MEMO Dayboard:n lisävarusteita. Käytettävissä olevat lisävarusteet, katso *Lisätarvikkeet* sivulla 23.

**VAROITUS:**

- *Lisävaruste Adaptation set sisältää pieniä osia, jotka eivät sovellu alle 3-vuotiaille lapsille tukehtumisvaaran vuoksi. Käytä lisävarustetta Lockable door tarvittaessa pitämään osat erillään käyttäjästä.*
- *Älä käytä teräviä esineitä kirjoitustaulun tai sivupaneelin painikkeisiin.*

Päivitä suunnittelutaulu joka päivä:

- *Näytä päivä, viikonpäivä ja kuukausi* sivulla 10.
- *Näytä tapahtumat ja tehtävät* sivulla 10.
- Varmista, että kaikki halutut hälytykset on asetettu oikein, katso *Herätysten asettaminen* sivulla 12.
- Aseta MEMO Dayboard tarvittaessa lukitustilaan, katso *Aseta lukitustila* sivulla 16.

Tee tarvittaessa seuraavat muutokset:

- *Muuta kirkkausasetuksia* sivulla 17.
- Muuta päivämäärää, kellonaikaa, hälytysääntä, hälytysvaloa ja muita yleisiä asetuksia, katso kohta *Muuta yleisiä asetuksia* sivulla 18.
- *Säädä päivä- ja yöaika tunteina* sivulla 19.
- Piilota ne taulun osat, joita ei tarvita, katso kohta *Piilota taulun osat* sivulla 19.
- *Käytä nimellä 12 tunnin versio* sivulla 20.

Näytä päivä, viikonpäivä ja kuukausi

Voit käyttää erilaisia materiaaleja ja lisävarusteita esittääksesi päivän, viikonpäivän ja kuukauden:

- Käytä lisävarusteen *Adaptation set* viikonpäivämagneetteja. Oikeanpuoleisia päivävärejä käytetään Skandinaviassa epävirallisena standardina.
- Käytä lisävarusteen *Adaptation set* kuukausikuvia ja kiinnitä ne itsekiinnittyviin magneettipidikkeisiin.
- Etsi kuukausikalenteri internetistä ja tulosta se A6-muodossa. Aseta kuukausikalenteri magneettiseen valokuvataskuun. Merkitse valkotaulukynällä esimerkiksi nykyinen päivämäärä tai ruksaa päivät, joita on jäljellä erikoistapahtumaan.

Maanantai
Tiistai
Keskiviikko
Torstai
Perjantai
Lauantai
Sunnuntai

Näytä tapahtumat ja tehtävät

Paranna tehtävien näkyvyyttä

- Kirjoita tai piirrä tehtävä eri valkotaulukynillä.
- Kuvita tehtävät kuvien avulla.
Handi-kuvia voi tulostaa osoitteesta www.handi.se/print. Kiinnitä tulostetut kuvat lisävarusteen *Adaptation set* itsekiinnittyviin magneettipidikkeisiin.




KÄRKI: Laminoi kuvat, jotta ne olisivat kestävämpiä.

- Tee tehtävistä konkreettisempia esineillä.
Käytä jääkaappimagneetteja tai kiinnitä esineitä lisävarusteen *Adaptation set* itsekiinnittyviin magneettipidikkeisiin.


Käytä tehtäväketjuja

Tehtäväketju auttaa tekemään tehtäviä tietyssä järjestyksessä. Luo tehtäväketju lisävarusteella *Adaptation set* kiinnittämällä useita kuvia itsekiinnittyvään nauhaan. Kun tehtävä on tehty, aseta ympyränmuotoinen magneetti kuvan päälle tai siirrä nuolimagneetti tehtäväketjun seuraavaan vaiheeseen.

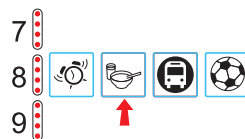


Linkitä tehtävä nykyiseen aikaan

Tehtävän tarkka alkuaika voidaan esittää käyttämällä lisävarusteen *Adaptation set* kolmiomagneeteilla tai piirtämällä pistejanan tai viivan valkotaulun kynillä.

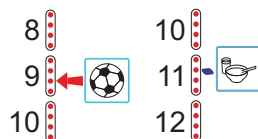

Selvennä, kuinka kauan tehtävä kestää

Selvennä tehtävän kesto esittämällä, kuinka monta valopistettä se käyttää lisävarusteen *Adaptation set* pyöreillä merkeillä tai tee kuvasta samanpituisen kuin aikapylvään vastaava aika.

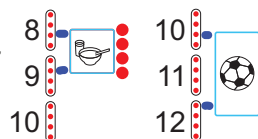

Selvennä, että päivä jatkuu

Voit merkitä tauluun, milloin käyttäjä poistuu ja milloin hän tulee kotiin.

Voit esimerkiksi esittää, että käyttäjä matkustaa päiväkeskukseen klo 10:00 ja palaa kotiin klo 15:00.

Näytä, että tehtävä on päättynyt

Voit poistaa kuvia taulusta sen merkiksi, että tehtävä on päättynyt tai henkilö on mennyt kotiin. Voit myös asettaa hälytyksen aktiviteetin päättymisaikaan, katso *Aseta uusi hälytys* sivulla 12.

Herätysten asettaminen



VAROITUS: Älä käytä MEMO Dayboard -tuotetta ainoana tukivälineenä lääkeyksien, lääketieteellisen hoidon tai muiden välttämättömien toimien yhteydessä.




HUOMAA:

- Hälytys on voimassa joka päivä, kunnes se poistetaan. Katso Poista hälytys sivulla 14.
- MEMO Dayboard poistuu automaattisesti asetustilasta 20 sekunnin kuluttua. Kaikki muutetut asetukset tallennetaan.

Näytä kaikki nykyiset hälytykset

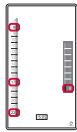
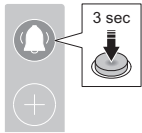


1. Siirry asetustilaan.
Kaikki ajankohdat ja hälytysvalo syttyvät.


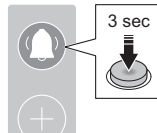


2. Poistu asetustilasta.

Aseta uusi hälytys

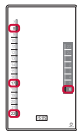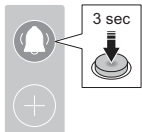


1. Siirry asetustilaan.
Kaikki ajankohdat ja hälytysvalo syttyvät.

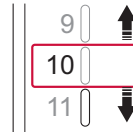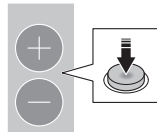


2. Valitse ajankohta + ja – painikkeilla.



KÄRKI: Pidä + tai - painiketta painettuna siirtääksesi osoitinta nopeammin.

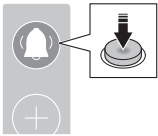


3. Aseta hälytys. Halua asettaa lisää hälytyksiä, toista vaiheet 2 ja 3 ennen kuin poistut asetustilasta.

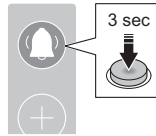

4. Poistu asetustilasta.

Pysäytä hälytys sivupaneelilla

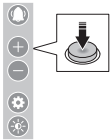

1. Paina sivupaneelin painiketta. Hälytysääni loppuu minuutin kuluttua. Hälytysvalo sammuu 15 minuutin kuluttua.


Pysäytä hälytys ohjauspainikkeen




VAROITUS: Käytä ainoastaan CE-merkittyjä ohjauspainikkeit.

Voit myös käyttää säätökytkintä hälytyksen pysäyttämiseksi helpommin. Käytettävissä on useita ohjauspainikkeita ja kytkimiä. Lisätietoja saat tuotteen jälleenmyyjältä, katso www.abilia.com/en/abilias-world/distributors.

Poista hälytys

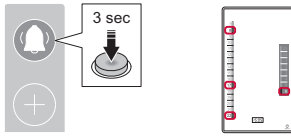


1. Siirry asetustilaan.
Kaikki ajankohdat ja hälytysvalo syttyvät.

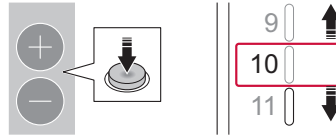


2. Valitse ajankohta + ja – painikkeilla.

💡 **KÄRKI:** Pidä + tai - painiketta painettuna siirtääksesi osoitinta nopeammin.

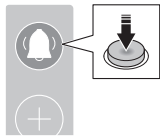


3. Poista hälytys.
Poista lisää hälytyksiä toistamalla vaiheet 2 ja 3 ennen kuin poistut asetustilasta.

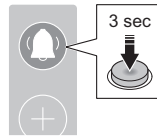


4. Poistu asetustilasta.


Poista kaikki hälytykset

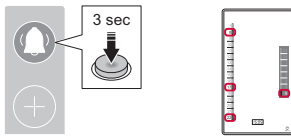

1. Siirry asetustilaan.
Kaikki ajankohdat ja hälytysvalo syttyvät.

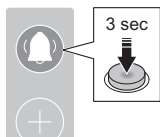

3. Poistu asetustilasta.

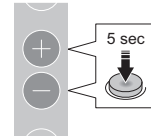

2. Poista kaikki hälytykset pitämällä + ja –-painikkeita painettuna viiden sekunnin ajan.

Aseta hälytysasetukset

Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä kaikki hälytykset sekä asettaa hälytysten valon ja äänen, katso kohta *Muuta yleisiä asetuksia* sivulla 18.

Mahdolliset asetukset ovat:

- Hälytysvalon toiminta: pois päältä, yksi vilkkuva valo tai koko pylvä vilkkuu.
- Onko hälytysten oltava käytössä tai pois käytöstä. Jos hälytykset ovat voimassa vain arkipäivinä, voit poistaa hälytykset käytöstä viikonloppuisin.




ESIMERKKI: Hälytyksen siirtäminen

- *Paina hälytysasetusten painiketta ja pidä sitä pohjassa 3 sekuntia.*
- *Valitse siirrettävän hälytyksen aika + ja – -painikkeilla.*
- *Poista hälytys painamalla hälytysasetusten painiketta.*
- *Valitse uuden hälytyksen aika + ja – -painikkeilla.*
- *Paina hälytysasetusten painiketta hälytyksen asettamiseksi.*
- *Poistu asetustilasta pitämällä hälytysasetusten painiketta painettuna 3 sekunnin ajan.*

Tulos: Vanha hälytys poistetaan ja uusi hälytys asetetaan!

Aseta lukitustila

Sivupaneelin painikkeet voidaan lukita siten, ettei asetuksia voi muuttaa.

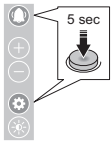

1. Ota lukitustila käyttöön tai poista se käytöstä pitämällä Asetukset- ja Hälytyspainikkeita painettuina, kunnes kuulet äänimerkin.



2. Kun MEMO Dayboard on lukitustilassa, eivät kaikki painikkeet ole käytössä. Käynnissä oleva hälytys voidaan edelleen pysäyttää.


Kun mitä tahansa painiketta painetaan lukitustilassa, näytössä näkyy "LOC".

Muuta kirkkausasetuksia


i **HUOMAA:** MEMO Dayboard poistuu automaattisesti asetustilasta 20 sekunnin kuluttua. Kaikki muutetut asetukset tallennetaan.

Muuta seuraavien kirkkautta:

- A. Aikapylväs, päivä
- B. Aikapylväs, yö
- C. Digitaalinen kello

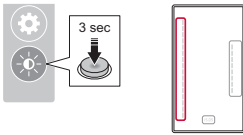


1. Siirry asetustilaan.

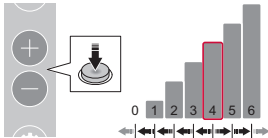


3. Muuta kirkkautta + - ja - - painikkeilla.

Jos haluat määrittää lisää asetuksia kerralla, toista vaiheet 2 ja 3 ennen kuin poistut asetustilasta.

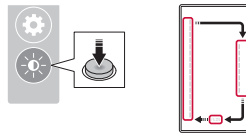


2. Valitse Kirkkaus-painikkeella A, B tai C.

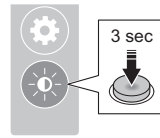

4. Poistu kirkkausasetustilasta.

Muuta yleisiä asetuksia

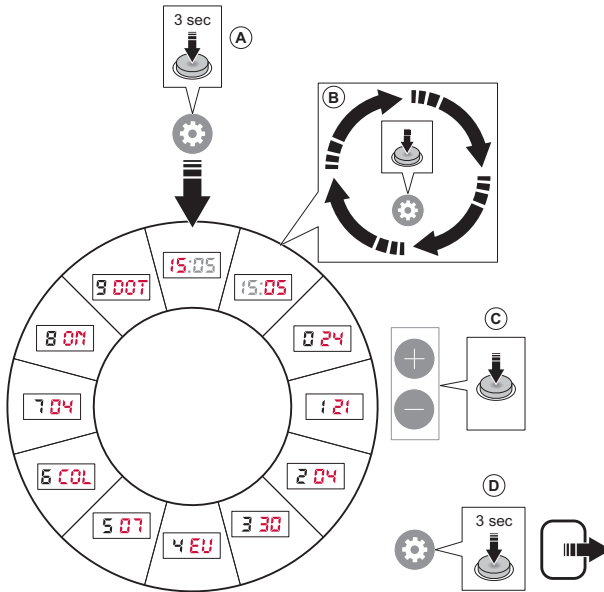

Vaiheet

- Siirry asetustilaan.
- Siirry oikeaan asetukseen.
- Muuta asetuksen arvoa.
- Tallenna ja poistu asetustilasta.

Asetukset


Kunkin asetuksen oletusarvo on näkyvissä kuvassa punaisena tekstinä.

- Tunnit (00–24)
- Minuutit (00–59)
- 0. Tuntitila (12 tai 24)
- 1. Vuosi, kaksi viimeistä numeroa (20XX)
- 2. Kuukausi (1–12)
- 3. Päivä 1–31
- 4. Kesäaika
 - EU: Eurooppalainen kesäaika
 - US: Amerikkalainen kesäaika
 - OFF: Ei kesäaikaa

- Aika pilarin alkuun
Jos näin ei ole 07, sinun on muutettava kellonajan sarakkeiden numerot. Katso *Säädä päivä- ja yöaika tunteina* sivulla 19.
- Aikapylvään näyttö
COL: pylväänä
DOT: pisteenä
- Hälytyksen äänenvoimakkuus
0: Ei ääntä
6: Maksimiäänenvoimakkuus
- Ota kaikki hälytykset käyttöön tai poista ne käytöstä
ON: Käytössä
OFF: Poissa käytöstä
- Aseta hälytysvalotehoste
OFF: Ei valotehostetta
DOT: Yksi valo vilkkuu
TOG: Koko pylväs vilkkuu

Säädä päivä- ja yöaika tunteina

MEMO Dayboard -laitteessa on kiinteät kellonajat päivälle (07:00-22:59) ja yölle (23: 00-06:59). Jos haluat muuttaa tätä ja saada päiväkäynnistyksen esimerkiksi aikaan klo 8.00, voit käyttää magneettinauhoja apuna, katso kohta *Lisätarvikkeet* sivulla 23.

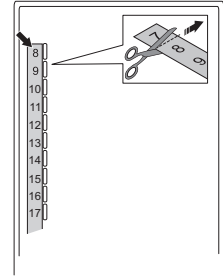

Tässä tapauksessa on säädettävä myös aikapylvään aloitusaikaa, katso kohta *Muuta yleisiä asetuksia* sivulla 18. Digitaalista kelloa ei tarvitse säätää.

Piilota taulun osat


Piilota aikapylvään osat

Jos haluat vain näyttää päivän osan tapahtumisesta, voit käyttää magneettinauhaa ilman tekstiä kattamaan aikapylvään palamattomaksi ajaksi, katso *Lisätarvikkeet* sivulla 23. Siitä voi olla hyötyä koulussa, jossa päivä päättyy klo 15.00, tai koulun jälkeisessä kerhossa, joka päättyy klo 17.00.

Jos yöpylväs on peitettävä, voidaan käyttää leveää valkoista teippiä.

Piilota aikapylvään numerot

Henkilöille, jotka eivät osaa kelloaikaa, MEMO Dayboard -laitteen numerot voivat olla hämmentäviä ja viedä huomion pois aikapylvästä ja päivän tapahtumista. Peitä numerot tekstittömillä magneettisilla nauhoilla, katso *Lisätarvikkeet* sivulla 23. Tämä pitää taulun mahdollisimman siistinä.

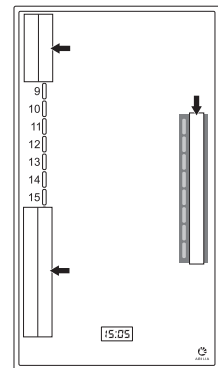


Käytä nimellä 12 tunnin versio

MEMO Dayboard 24 tunnin versio on mahdollista muuntaa 12 tunnin versioon käyttämällä lisävarusteena saatavaa *Magnetic Strips, 12h*, katso *Lisätarvikkeet* sivulla 23.

Voi myös olla suositeltavaa asettaa digitaalinen kello 12 tunnin tilaan, katso *Muuta yleisiä asetuksia* sivulla 18.

Samoin 12 tunnin versio voidaan muuntaa 24 tunnin versiona.

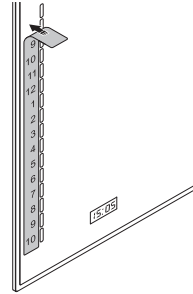

Huolto

Puhdista MEMO Dayboard


Puhdista MEMO Dayboard mukana tulleella mikrokuituliinalla ja pienellä määrällä vettä.




KÄRKI: Onko taulu vaikea puhdistaa? Pyyhi taulukynällä vaikeasti poistettavien tekstien tai merkkien yli, ja odota minuutti ennen pyyhkimistä.

Palauta tehdasasetukset

Voit joutua nollaamaan MEMO Dayboard-laitteen, kun valmistelet sen uutta käyttäjää varten tai etsit vikaa. Tehdasasetusten palauttaminen poistaa kaikki mahdollisesti tekemäsi hälytykset ja asetusmuutokset.

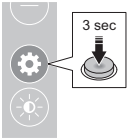

1. Siirry asetustilaan pitämällä yleisten asetustenpainiketta painettuna.

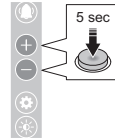

2. Palauta laitteen tehdasasetukset pitämällä + ja –-painikkeita painettuna.

Varastointi ja hävittäminen

Säilytä tuote huoneenlämpötilassa ja kosteudelta suojattuna.



Tuotteessa on elektronisia osia, jotka on kierrätettävä. Vie tuote hävitettäväksi asianmukaiseen keräyspisteeseen.

Vianetsintä

Jos sinulla on kysyttävää tuotteen toiminnoista tai asetuksista, ota yhteys tuotteen toimittajaan tai jälleenmyyjään.

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Jotkin sivupaneelin painikkeet eivät toimi.	Tuote on lukitussa tilassa	Katso ohjeet kohdassa <i>Aseta lukitustila</i> sivulla 16.
	Laite on viallinen.	Pyydä tukea ¹ .
Asetettu hälytys ei laukea	Tuotetta ei ole kytketty pistorasiaan	Katso ² .
	Hälytykset on poistettu käytöstä	Katso ohjeet kohdassa <i>Ota kaikki hälytykset käyttöön tai poista ne käytöstä</i> asetuskohdassa <i>Muuta yleisiä asetuksia</i> sivulla 18.
	Hälytysääni ja valotehosteet ovat pois päältä	Katso ohjeet kohdassa <i>Hälytyksen äänenvoimakkuus</i> ja <i>Aseta hälytysvalotehoste</i> sivulla 18.
	Laite on viallinen.	Pyydä tukea ¹ .
Digitaalinen kello ei ole näkyvissä	Tuotetta ei ole kytketty pistorasiaan	Katso ² .
	Kellon kirkkaus on pois päältä	Katso ³ .
	Laite on viallinen.	Pyydä tukea ¹ .
Aikapylvästä aika ei ole sama kuin kello	Kello ja aikapylväs eivät ole synkronoituja	Muuta aikapylvän alkamisaikaa, katso <i>Muuta yleisiä asetuksia</i> sivulla 18.
Toinen tai kumpikaan aikapylväistä eivät ole näkyvissä	Tuotetta ei ole kytketty pistorasiaan	Katso ² .
	Pylvään kirkkausasetus on pois päältä	Katso ³ .
	Laite on viallinen.	Pyydä tukea ¹ .
Levy ei puhdistu	Muovikalvo on vaihdettava	Pyydä tukea ¹ .
Tuote ei toimi oikein	Laite on viallinen.	Pyydä tukea ¹ . Tukihenkilöstö saattaa pyytää sinua palauttamaan tuotteen tehdasasetukset. Katso ohjeet kohdassa <i>Palauta tehdasasetukset</i> sivulla 21.

¹Katso *Yhteystiedot* sisemmällä takasivulla.

²Katso ohjeet kohdassa *Käynnistä MEMO Dayboard* sivulla 8.

³Katso ohjeet kohdassa *Kirkkausasetusten muuttaminen* sivulla 17.

Tuotetiedot

MEMO Dayboard

Mitat, K x L x S	713 x 392 x 32 mm
Paino	3,8 kg
Virtalähde	9 V DC, 1,1 A
Ohjauspainikkeen liitin	3,5 mm

Lisätarvikkeet

MEMO Dayboard -laitteessa on seuraavat lisävarusteet:

- 508785 Adaptation set
- 508786 Accessory Kit
- 508787 Magnetic Strips no print
- 508788 Magnetic Strips, 24h
- 508789 Magnetic Strips, 12h
- 508790 Magnetic Strips, clock
- 508794 Table stand
- 508795 Pen Tray
- 508796 Lockable door
- 508821 Power Supply MEMO Dayboard

Lisätietoja MEMO Dayboard -laitteesta ja lisävarusteista saat osoitteesta

www.abilia.com/intl/our-products/memo-dayboard-24h tai lukemalla QR-koodin.



**Skannaa
minut!**

Tärkeää tietoa

Lue ja ymmärrä tämän käyttöohjeen sisältö ennen tuotteen käyttöä.

Turvallisuusmääritelmät



VAROITUS: Loukkaantumis- tai hengenvaara, jos annettuja ohjeita ei noudateta.



VAROVAISUUTTA: Tuotteen vaurioitumisen vaara, jos ohjeita ei noudateta.



Tiedot, jotka tarvitaan määrättyssä tilanteessa.

Käyttöä koskevat turvallisuusohjeet



Lue seuraavat varoitusohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa.

- Älä käytä MEMO Dayboard -tuotetta ainoana tukivälineenä lääkityksen, lääketieteellisen hoidon tai muiden välttämättömien toimien yhteydessä.
- Käytä ainoastaan CE-merkittyjä ohjauspainikkeet.
- Käytä ainoastaan MEMO Dayboard -laitteen mukana tullutta alkuperäistä muuntajaa.
- Älä käytä teräviä esineitä kirjoitustaulun tai sivupaneelin painikkeisiin.
- Kiinnitä MEMO Dayboard oikein. Virheellinen asennus voi aiheuttaa vahinkoa laitteelle tai loukkaantumisen.
- Lisävaruste *Adaptation set* sisältää pieniä osia, jotka eivät sovellu alle 3-vuotiaille lapsille tukehtumisvaaran vuoksi. Käytä lisävarustetta *Lockable door* tarvittaessa pitämään osat erillään käyttäjästä.

Vakavat tapaturmat

Jos tuotteen käytössä tapahtuu vakava tapaturma, siitä on ilmoitettava valmistajalle ja maasi toimivaltaiselle viranomaiselle. Vaaratilanne on vakava, jos sen katsotaan suoraan tai epäsuorasti johtaneen, voivan johtaa tai epäillään johtavan johonkin seuraavista tilanteista:

- Potilaan, käyttäjän tai muun henkilön kuolema
- Potilaan, käyttäjän tai muun henkilön terveydentilan tilapäinen tai pysyvä vakava heikkeneminen
- Vakavaan uhkaan kansanterveydelle.

Lääkinnällisiä laitteita koskeva vaatimustenmukaisuus

Tuotetta MEMO Dayboard markkinoidaan teknisenä apuvälineenä toimintarajoitteisille ihmisille, ja se täyttää kaikki lääkinnällisille laitteille asetetut vaatimukset, määräykset ja direktiivit.

Tuotevastuu

Tuote on kehitetty ja riskiarvioitu ISO 14971 -standardin mukaisesti. Käyttöopas ja tekniset tiedot on laadittu riskianalyysissä tehtyjen turvallisuusarviointien mukaisesti. Huomioi aina turvallisuus tuotetta käyttäessäsi. Tuotteen muuhun kuin sen käyttötarkoituksen mukaiseen käyttöön voi liittyä riskejä, joista Abilia AB ei vastaa. Tuotteen arvioitu käyttöikä päättee, kun tuotetta käytetään sen käyttö- ja huolto-ohjeiden mukaisesti.

Abilia AB ei vastaa menetyksistä, vahingoista tai välillisistä vahingoista, jos tuotetta on käytetty tai se on asennettu muulla kuin tässä asiakirjassa kuvatulla tavalla. Mikä tahansa tuotteen vaurioittaminen tai muokkaaminen mitätöi takuun ja mitätöi valmistajan vastuun.

Yhteystiedot

Ruotsi

Abilia AB, Råsundavägen 6, 169 67 Solna, Ruotsi
Puhelin +46 (0)8- 594 694 00 | support@abilia.se | www.abilia.se

Norja

Abilia AS, Tevlingveien 23, 1081 Oslo, Norja
Puhelin +47 23 28 94 00 | support@abilia.no | www.abilia.no

Yhdistynyt kuningaskunta

Abilia UK Ltd, Unit 10 Buckingham Business Park, Swavesey,
Cambridge, CB24 4AE, Yhdistynyt kuningaskunta
Puhelin +44 (0) 1954 281 210 | support@abilia.uk | www.abilia.uk

Kansainvälinen

www.abilia.com/intl/get-products/distributors



508820 508825_Käyttöohje_MEMO Dayboard_FI, October 2023



Abilia AB, Råsundavägen 6, 169 67 Solna, Ruotsi
Puhelin +46 (0)8- 594 694 00 | info@abilia.com | www.abilia.com



ABILIA