

ProWipes Desinfektiopyyhe

Etanoli pesevä



Etanolipohjainen pesevä desinfektiopyyhe terveydenhuollon laitteille ja tarvikkeille, joilla ei läpäistä ihoa tai limakalvoja sekä terveydenhuollon hoitoympäristön pinnoille. Vaikuttavina aineina 75 % alkoholi (70 % etanolia, 5 isopropanolia) sekä pesevänä ainesosana alkyylipolyglukosidi C8-10. Laadukas kansimekanismi takaa, että pakkaus on helposti avattavissa ja suljettavissa uudestaan.

Mikrobisidinen teho

- EN 13624 Kvantitatiivinen suspensiotesti sieniä ja hiivoja tappavan tehon määrittämiseksi terveydenhuollossa (2/1)
- EN 13697 Kvantitatiivinen pintatesti bakteereja, sieniä ja hiivoja tappavan tehon määrittämiseksi (2/2)
- EN 13727 Kvantitatiivinen suspensiotesti bakteereja tappavan tehon määrittämiseksi terveydenhuollossa (2/1)
- EN 14348 Kvantitatiivinen suspensiotesti mykobakteereja tappavan tehon määrittämiseksi (2/1)
- EN 14476 +A1 Kvantitatiivinen suspensiotesti virusidisen tehon osoittamiseksi terveydenhuollossa (2/1)
- EN 16615 Kvantitatiivinen bakterisidinen ja yestisidinen testi ei-huokoisille pinnoille mekaniikkaa käyttäen terveydenhuollossa (2/1)

Käyttöohje

Käytä pesevää etanoli desinfektiopyhettä alkoholia kestävien pintojen puhdistamiseen ja desinfiointiin. Noudata desinfioitavan välineen tai kohteen valmistajan ohjetta soveltuvista desinfektioaineista. Tarkista, että pakkauksen säilyvyysaika on voimassa. Desinfioi kädet ja pue suojakäsineet. Ota pyyhe ja sulje pakkaus huolellisesti. Pyyhi pinta, anna kuivua, älä kuivaa. Laita käytetty pyyhe suoraan jätteisiin. Riisu suojakäsineet ja desinfioi kädet.

HUOM! Merkitse pakkaukseen päivä, jolloin pakkaus on avattu.

Koko

20 x 30 cm

Tuotenumerot, pakkauskoot, myyntierät ja EAN

15770154 25 kpl/pakkaus ME 20 pkt 414504964913

Pakkaus ja ympäristö

Pakkaukset ja pyyhkeet ovat kierrätettäviä. Pyyhkeiden materiaali on 50 g non-woven polyesteri. Pakkaukset ovat PET/PE-muovia. Sekä pyyhkeet että pakkaukset ovat kierrätettäviä ja voidaan hävittää energijätteenä.

Säilyvyys ja kelpoisuus aika

Säilyy avaamattomana 3 vuotta valmistuksesta ja 6 kuukautta avaamisen jälkeen.

Alkuperämaa

Iso-Britannia

Koostumus

Etanoli 70 %
Isopropanoli 5 %
Alkyylipolyglukosidi C8-10

pH 5-7

20180919

Berner Pro

Hitsaaankatu 24, 00810 Helsinki, puh. 020 690 761, pro@berner.fi, www.berner.fi/pro

BERNER