

EN 13624 • EN 13697 • EN 13727 • EN 14348 • EN 14476 • EN 16615



Alkoholiton, puhdistava ProWipes desinfektiopyyhe terveydenhuollon hoitoympäristön pinnoille sekä laitteille ja tarvikkeille, joilla ei läpäistä ihoa tai limakalvoja. Vaikuttavina aineina triamiini ja kvaternääriset ammoniumyhdisteet, joiden yhteisvaikutus takaa erinomaisen desinfektiovoiman. Pyyhkeet eivät sisällä alkoholeja tai PHMB:tä. Laadukas kansimekanismi takaa, että pakkaus on helposti avattavissa ja suljettavissa uudestaan. Noudata valmistajan antamaa laitteen tai välineen puhdistus- ja desinfiointiohjetta.

Mikrobisidinen teho

- EN 13624 Kvantitatiivinen suspensiotesti hiivoja tappavan tehon määrittämiseksi terveydenhuollossa (2/1)
- EN 13697 Kvantitatiivinen pintatesti bakteereja ja hiivoja tappavan tehon määrittämiseksi (2/2)
- EN 13727 Kvantitatiivinen suspensiotesti bakteereja tappavan tehon määrittämiseksi terveydenhuollossa (2/1)
- EN 14348 Kvantitatiivinen suspensiotesti mykobakteereja tappavan tehon määrittämiseksi (2/1)
- EN 14476 +A1 Kvantitatiivinen suspensiotesti virusidisen tehon osoittamiseksi terveydenhuollossa (2/1)
- EN 16615 Kvantitatiivinen pyyhintätesti bakteereja ja hiivoja tappavan tehon määrittämiseksi terveydenhuollossa (2/2)

Käyttöohje

Noudata desinfiointivälineen tai kohteen valmistajan ohjetta soveltuvista desinfiointiaineista. Tarkista, että pakkauksen säilyvyysaika on voimassa. Desinfioi kädet ja pue suojakäsineet. Ota pyyhe ja sulje pakkaus huolellisesti. Pyyhi pinta niin, että se kastuu kauttaaltaan. Erittäin likaisiin pintoihin saatetaan tarvita useampia pyyhkeitä. Noudata annettua desinfiointiaikaa. Tuote vaahtoa pyyhkimisen aikana ja vaahto häviää, kun pinta on kuivunut. Laita käytetty pyyhe suoraan jätteisiin. Riisu suojakäsineet ja desinfioi kädet.

HUOM! Merkitse pakkauksen päivä, jolloin pakkaus on avattu ensimmäisen kerran.

Koko

300 x 200 mm

Pakkaus ja ympäristö

Pakkaukset ja pyyhkeet ovat kierrätettäviä. Pyyhkeiden materiaali on 50 g non-woven polyesteri. Pakkaukset ovat PET/PE-muovia. Sekä pyyhkeet että pakkaukset ovat kierrätettäviä ja voidaan hävittää energiäjätteenä.

Säilyvyys ja kelpoisuusaika

Säilyvyys avaamattomana 3 vuotta valmistuksesta ja 3 kuukautta avaamisen jälkeen. Säilytä viileässä, kuivassa paikassa.

Alkuperämaa

Iso-Britannia

Koostumus

2-Aminoetanol < 1%
Didekyylimetyyliammoniumkloridi < 1%
N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine < 1%
Alkoholietoksyalaatti

pH 10

Bea Pro ProWipes alkoholiton desinfektiopyyhe 300 x 200 mm 25 kpl

Tuotenumero: 15768673
Myyntierä: 20 pkt
Lava: 1000 pkt
GTIN vähittäistuote: 6414504950732
GTIN kuljetuspakkaus: 5025254047095

20220218