

# A12t Dilutus® 80% desinfektiopyyhe

## Yksittäispakattu



A12t Dilutus 80 % yksittäispakattu desinfektiopyyhe sisältää lievästi denaturoitua etanoliliuosta. Kertakäyttöiset desinfektiopyyhkeet soveltuvat injektioporttien, korkkien ja erilaisten liittimien desinfiointiin, ihon desinfiointiin ennen injektion antoa tai näytteenottoa sekä pistotapaturman hauteeksi.

Pakkaus on suunniteltu siten, että pyyhe on mahdollista ottaa aseptisesti käyttöön.

### Mikrobisidinen teho

A12t Dilutus 80 % desinfektiopyyhe on testattu eurooppalaisen standardin mukaan ja se täyttää sen asettaman vaatimuksen:

- EN 13727 Kvantitatiivinen suspensiotesti bakterisidisen tehon osoittamiseksi terveydenhuollossa 15 s (faasi 2/vaihe 1)

### Käyttöohje

Desinfioi kädet ja pue suojakäsineet. Poista näkyvä lika iholta keittosuoliuoksella ennen A12t Dilutus 80% yksittäispakattun pyyhkeen käyttöä.




1. Avaa pakkaus repäisemällä yläreunasta siten, että pyyhe säilyy koskemattomana.



2. Vedä pyyhe ulos pakkauksesta ja avaa pyyhkeen taitokset.



3. Käsittele haluttu kohde huolellisesti pyyhkimällä 20 sekunnin ajan.

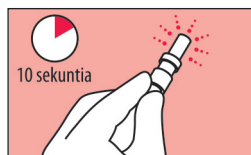

4. Anna pyyhityn pinnan kuivua 10 sekuntia.

### Tuotenumerot, pakkauskoost, myyntierät ja EAN

15774675 250 kpl/ltk ME 1 ltk 6414505003536

### Koko

Pyyhkeen koko: 120 x 180 mm

Yksittäispakkauksen koko: 80 x 100 mm

Pahvipakkauksen koko: 250 x 150 x 200 mm

### Säilyvyys ja kelpoisuusaika

Säilytetään ja varastoidaan suljettuna kuivassa ja viileässä paikassa. Säilyy oikein varastoituna 2 vuotta.

### Turvallisuus

Ei kuumille pinnoille. Ei sovellu sarveiskalvoille, palovammoille tai haavoille. Suositellaan suojakäsineiden käyttöä. Lisätietoa tuotteesta löytyy käyttöturvallisuustiedotteesta.

### Pakkaus ja ympäristö

Pyyhe voidaan hävittää energijätteeseen. Pyyhkeen yksittäispakkaus hävitetään sekajätteeseen. Pakkaukskartonki hävitetään pahvinkeräykseen.

### Alkuperämaa

Suomi

### Koostumus

Liuos etanoli (denat. A12t®) 85,5 t-% / 80 p-%

Aqua ad 100%

Pyyhe polyesteriviskoosia

### Ei soveltuvat käyttökohteet

- Ei etanolia kestävämmille materiaaleille
- Ei sovellu limakalvojen desinfiointiin
- Ei kosteille pinnoille
- Ei preoperatiiviseen desinfiointiin
- Ei invasiivisille välineille tai laitteille

20190819

**Berner Pro**

Hitsaajankatu 24, 00810 Helsinki, puh. 020 690 761, pro@berner.fi, www.berner.fi/pro

**BERNER**