




Kirurginen suu-nenäsuojus Tyyppi II kiinnityslenkeillä

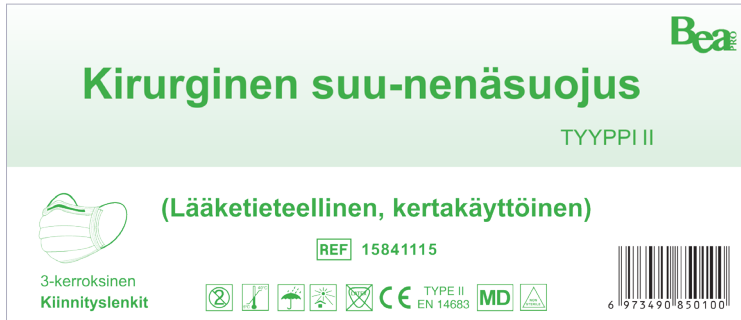

Erittäin hyvin istuva ja hengittävä kolmikerroksinen PP-kuitukankaasta valmistettu tyyppi II suu-nenäsuojus muotoiltavalla nenäosalla ja korvien taakse kiinnitettävillä joustavilla lenkeillä. Korkean suodatuskapasiteetin omaava suu-nenäsuojus täyttää standardin SFS EN 14683:2019 suodatustehokkuusvaatimuksen. Hypoallergeeninen suu-nenäsuojus on lasikuiduton ja lateksiton.

Käyttökohde

Lääketieteellinen, kauneus-, teollisuus- ja muu ala

Käyttöohjeet



Pese tai desinfioi kädet ennen kuin asetat puhtaan suu-nenäsuojuksen kasvoille. Aseta suu-nenäsuojus kasvoille korvien taakse asetettavilla kiinnityslenkeillä niin että nenä ja suu peittyvät. Älä koske suu-nenäsuojuksen pintaan ennen kuin suojus on puettu päälle. Muotoile suu-nenäsuojus nenän juureen tiiviisti siten, että nenä peittyy sen alle ja vedä suojuksen alareuna leuan alle. Älä kosketele suojusta käytön aikana. Pese kädet ennen kuin poistat suu-nenäsuojuksen tarttumalla kiinnityslenkkeihin. Älä koske suojuksen pintaan. Pese tai desinfioi kädet suu-nenäsuojuksen riisumisen jälkeen ja hävitä käytetty suojus.

Tuotenumero, pakkauskoko ja EAN

15841115 50 kpl 6973490850100

Materiaali

100% polypropeenikuitukangasta (sulapuhallettu)

Väri

Vaaleansininen

Varastointiohjeet

Säilytettävä kuivassa ja suojassa auringon valolta. Säilytyslämpötila alle 40°C. Kosteusolosuhteet alle 80%.

Turvallisuus

Suu-nenäsuojus on kertakäyttöinen ja käytön jälkeen suojus hävitetään sekajätteen mukana.

Valmistusmaa

Kiina

Valmistaja

Unimax Trading (HK) Ltd

Maahantuoja

Berner Oy



20210310

Berner Pro

Hitsaajankatu 24, 00810 Helsinki | +358 (0) 20 690 761 | pro@berner.fi | berner.fi/pro

