

A12t DILUTUS® 80%

Lievästi denaturoitu etanoliliuos

EN 1500 • EN 12791 • EN 13624 • EN 13697 • EN 13727 • EN 14561 • EN 14562

Kirkas ja lähes tuoksuton lievästi denaturoitu etanoliliuos, joka haihtuu nopeasti.

Käyttökohteet

A12T Dilutus 80 % desinfiointiliuos soveltuu terveydenhuollon ei-invasiivisten välineiden ja laitteiden desinfiointiin sekä ihon desinfiointiin ennen injektion antoa, näytteenottoa tai muuta invasiivista toimenpidettä. Käytetään sellaisenaan ihon preoperatiiviseen desinfiointiin.

Ei soveltuvat käyttökohteet:

- Ei limakalvoille
- Ei materiaaleille, jotka eivät siedä alkoholia

Mikrobisidinen teho

Etanoli tuhoaa bakteerit, hiivat, homeet ja useimmat virukset. Poikkeuksen muodostavat bakteeri-itiöt ja vaipattomat virukset, joihin etanoli ei sellaisenaan tehoa.

A12t Dilutus 80 % on testattu seuraavien eurooppalaisten standardien mukaan ja se täyttää niiden asettamat vaatimukset:

- EN 1500 Hygieeninen käsidesinfektio (faasi 2/vaihe 2)
- EN 12791 Kirurginen käsidesinfektio (faasi 2/vaihe 2)
- EN 13727 Kvantitatiivinen suspensiotesti bakterisidisen tehon osoittamiseksi terveydenhuollossa (faasi 2/vaihe 1)
- EN 13624 Kvantitatiivinen suspensiotesti fungisidisen ja yestisidisen tehon osoittamiseksi terveydenhuollossa (faasi 2/vaihe 1)
- EN 13697 Kvantitatiivinen pintatesti ei-huokoisille materiaaleille bakterisidisen ja/tai fungisidisen tehon osoittamiseksi ilman mekaanista hankausta (faasi 2/vaihe 2)
- EN 14561 Kvantitatiivinen carrier-testi bakterisidisen tehon osoittamiseksi instrumenttien desinfiointiin terveydenhuollossa (faasi 2/vaihe 1)
- EN 14562 Kvantitatiivinen carrier-testi fungisidisen tai yestisidisen tehon osoittamiseksi instrumenttien desinfiointiin terveydenhuollossa (faasi 2/vaihe 1)

Käyttöohje

Käytetään puhtaalle, kuivalle pinnalle tai iholle. Käytetään sellaisenaan ihon preoperatiiviseen desinfiointiin sekä ennen invasiivisia toimenpiteitä sairaalakohtaisten ohjeiden mukaisesti. Alkoholin desinfiointiaika on sen kuivumisaika. Ei-invasiiviset välineet ja laitteet desinfioidaan riittävällä määrällä liuosta ja annetaan kuivua valmistajan ohjeiden mukaan.



Tuotenumerot, pakkauskoot, myyntierät ja EAN

13221122	100 ml pullo	ME 16 kpl	6414504294737
13221124	500 ml pullo	ME 12 kpl	6414500007065
13221126	1 L pullo	ME 12 kpl	6414500007058
13221132	5 L kanisteri	ME 3 kpl	6414504139847

Säilyvyys ja kelpoisuusaika

Tuote säilyy oikein varastoituna viisi vuotta avaamattomana ja kaksi vuotta avattuna. Säilytetään varastossa pystyasennossa.

Turvallisuus

Helposti syttyvä neste ja höyry. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta ja kuumilta pinnoilta. Ei saa säilyttää suorassa auringonvalossa. Säilytä tiiviisti suljettuna. Jos ainetta joutuu silmiin, huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Lisätietoa turvallisuudesta käytöstä käyttöturvallisuustiedotteessa.

Pakkaus ja ympäristö

Muoviset pakkausmateriaalit ovat kierrätyskelpoisia ja poltettavia. Muovinkeräykseen muovipakkaus soveltuu huuhdeltuna, pullo ja suljin eroteltuina. Pakkauskartonki lajitellaan kartonkikeräykseen. Pakkauksen ja valmisteen yhteensopivuus on laatuvarmennettu.

Koostumus

Etanoli (denat. A12t®) 85,5 t-% / 80 p-%
Aqua ad 100%

20200320