

# A12t DILUTUS® 80%

## Lievästi denaturoitu etanoliliuos

EN 1500 • EN 12791 • EN 13624 • EN 13697 • EN 13727 • EN 14561 • EN 14562

Kirkas ja lähes tuoksuton lievästi denaturoitu etanoliliuos, joka haihtuu nopeasti.

### Käyttökohteet

A12T Dilutus 80 % desinfiointiliuos soveltuu terveydenhuollon ei-invasiivisten välineiden ja laitteiden desinfiointiin sekä ihon desinfektioon ennen injektion antoa, näytteenottoa tai muuta invasiivista toimenpidettä. Käytetään sellaisenaan ihon preoperatiiviseen desinfektioon.

### Ei soveltuvat käyttökohteet:

- Ei limakalvoille
- Ei materiaaleille, jotka eivät siedä alkoholia

### Mikrobisidinen teho

Etanoli tuhoaa bakteerit, hiivat, homeet ja useimmat virukset. Poikkeuksen muodostavat bakteeri-itiöt ja vaipattomat virukset, joihin etanoli ei sellaisenaan tehoa.

A12t Dilutus 80 % on testattu seuraavien eurooppalaisten standardien mukaan ja se täyttää niiden asettamat vaatimukset:

- EN 1500 Hygieeninen käsidesinfektio (faasi 2/vaihe 2)
- EN 12791 Kirurginen käsidesinfektio (faasi 2/vaihe 2)
- EN 13727 Kvantitatiivinen suspensiotesti bakterisidisen tehon osoittamiseksi terveydenhuollossa (faasi 2/vaihe 1)
- EN 13624 Kvantitatiivinen suspensiotesti fungisidisen ja yestisidisen tehon osoittamiseksi terveydenhuollossa (faasi 2/vaihe 1)
- EN 13697 Kvantitatiivinen pintatesti ei-huokoisille materiaaleille bakterisidisen ja/tai fungisidisen tehon osoittamiseksi ilman mekaanista hankausta (faasi 2/vaihe 2)
- EN 14561 Kvantitatiivinen carrier-testi bakterisidisen tehon osoittamiseksi instrumenttien desinfektioon terveydenhuollossa (faasi 2/vaihe 1)
- EN 14562 Kvantitatiivinen carrier-testi fungisidisen tai yestisidisen tehon osoittamiseksi instrumenttien desinfektioon terveydenhuollossa (faasi 2/vaihe 1)

### Käyttöohje

Käytetään puhtaalle, kuivalle pinnalle tai iholle. Käytetään sellaisenaan ihon preoperatiiviseen desinfektioon sekä ennen invasiivisia toimenpiteitä sairaalakohtaisten ohjeiden mukaisesti. Alkoholin desinfektioaika on sen kuivumisaika. Ei-invasiiviset välineet ja laitteet desinfioidaan riittävällä määrällä liuosta ja annetaan kuivua valmistajan ohjeiden mukaan.



### Tuotenumerot, pakkauskoot, myyntierät ja EAN

13221122	100 ml pullo	ME 16 kpl	6414504294737
13221124	500 ml pullo	ME 12 kpl	6414500007065
13221126	1 L pullo	ME 12 kpl	6414500007058
13221132	5 L kanisteri	ME 3 kpl	6414504139847

### Säilyvyys ja kelpoisuus aika

Tuote säilyy oikein varastoituna viisi vuotta avaamattomana ja kaksi vuotta avattuna. Säilytetään varastossa pystyasennossa.

### Turvallisuus

Helposti syttyvä neste ja höyry. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta ja kuumilta pinnoilta. Ei saa säilyttää suorassa auringonvalossa. Säilytä tiiviisti suljettuna. Jos ainetta joutuu silmiin, huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Lisätietoa turvallisuudesta käyttöturvallisuustiedotteessa.

### Pakkaus ja ympäristö

Muoviset pakkausmateriaalit ovat kierrätyskelpoisia ja poltettavia. Muovinkeräykseen muovipakkaus soveltuu huuhdeltuna, pullo ja suljin eroteltuina. Pakkauskartonki lajitellaan kartonkikeräykseen. Pakkauksen ja valmisteen yhteensopivuus on laatuvarmennettu.

### Koostumus

Etanoli (denat. A12t®) 85,5 t-% / 80 p-%  
Aqua ad 100%

20191014