

Eurodispenser 3 Flex


Pulloteline



500 ml pumpupulloille soveltuva ruostumattomasta teräksestä valmistettu teline, joka sisältää myös muovisia osia. Teline on erittäin monipuolinen ja voidaan kiinnittää mm. tippatelineeseen, sänkyyn ja pöytään.

Käyttöohjeet

Paina sinisiä muoviosia toisiaan vasten vapauttaaksesi pullotelineen ja käännä se haluamaasi kulmaan (1-3).

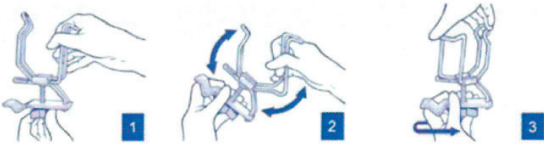

Aseta teline haluamaasi paikkaan ja kiristä teline paikoilleen ruuvaamalla muoviosat tukea vasten (4-6).



Aseta käsihuuhde telineeseen (7-9).



Puhdistusohjeet

1. Manuaalinen puhdistus ja desinfektio

- Puhdista näkyvä lika telineestä kostutetulla kertakäyttöpyyhkeellä
- Käsittele teline huolellisesti teräkselle soveltuvalla desinfektioaineella
- Huomioi riittävä vaikutusaika

2. Koneellinen puhdistus ja desinfektio

- Esipuhdistettu teline voidaan puhdistaa ja desinfioida pesu- ja desinfiointikoneessa
- Puhdistusaineen soveltuva pH-taso on 7-12 ja maksimilämpötila 93 °C

3. Autoklaavaus

Tarpeen mukaan Eurodispenser 3 Flex on myös mahdollista käsitellä höyry-autoklaavissa seuraavasti:

- 121 °C, 1 bar – 30 minuuttia
- 134 °C, 2 bar – enintään 20 min

Eurodispenser 3 Flex pulloteline

Tuotenumero: 9814500

Myyntierä: 1 kpl

Lava: 100 kpl

GTIN vähittäistuote: 4031678069347

GTIN kuljetuspakkaus:

20220517