

# Kirurgiskt mun- och nässkydd typ IIR ANTI-FOG, knytband



Mycket välpassande och andningsbart typ IIR mun- och nässkydd tillverkat av PP-fiberduk. Mun- och nässkyddet består av tre lager, innehåller formbar näsklämma och knyts bakom huvudet med knytband. Mun- och nässkyddet har hög filtreringskapacitet och uppfyller standard SFS EN 14683: 2019 krav på filtreringseffektivitet. Hypoallergeniskt mun- och nässkydd är glasfiber-, doft-, nickel-, och latexfritt.

## Avsedd användning

Sjukvård, skönhet, industri och andra branscher

## Bruksanvisning



Tvätta eller desinfektera händerna innan du tar på dig ett rent mun- och nässkydd. Täck både näsa och mun och knyt fast mun- och nässkyddet bakom huvudet med hjälp av knytband. Rör inte mun- och nässkyddets yta förrän du har det på dig. Forma mun- och nässkyddet tätt vid näsryggen, så att näsan täcks och dra sedan skyddets nedre kant under hakan. Rör inte mun- och nässkyddet under användning. Tvätta händerna innan du tar av dig mun- och nässkyddet. Avlägsna skyddet genom att öppna knytbanden. Rör inte skyddets yta. Tvätta eller desinfektera händerna efter att du tagit av dig mun- och nässkyddet och kasta det använda skyddet.

## Material

PP-fiberduk, Anti-Fog skum

## Färg

Ljusblå och vit

## Förvaringsinstruktioner

Förvaras torrt och skyddad från solljus. Förvaringstemperatur under 40°C. Luftfuktighet mindre än 80%.

## Säkerhet

Mun- och nässkyddet är för engångsbruk och efter användning sorteras med blandavfall.

## Tillverkningsland

Kina

## Importör

Berner Oy

## Distributör i Sverige

Bröderna Berner AB, Berner Medical

## Kirurgiskt mun- och nässkydd typ IIR ANTI-FOG, knytband ljusblå

Artikelnummer: 15841114  
Avdelningsförpackning: 50 st  
Transportförpackning: 20 x 50 st

## Kirurgiskt mun- och nässkydd typ IIR ANTI-FOG, knytband vit

Artikelnummer: 15842342  
Avdelningsförpackning: 50 st  
Transportförpackning: 20 x 50 st



20200128