



DETECT & DISSOLVE
BIOFILM MATRIX



OneLife
enziMed® Pre-Cleaner

Monientsymaattinen esikäsittelyvaahto kirurgisille instrumenteille ja jäykille sekä taipuisille endoskoopeille.

- Estää lian kiinnittymisen ja kuivumisen käytetyissä instrumenteissa.
- Entsyymit hajottavat orgaanisen aineksen.
- Esipuhdistaa tehokkaasti ilman käyttäjän toimia entsyymien avulla.

Käyttökohteet


Hammaslääketieteelliset instrumentit



Kirurgiset instrumentit



Kosmeettiset kirurgiset instrumentit

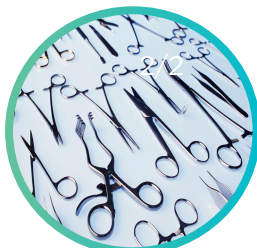

Tuoteominaisuudet

- Neutraali monientsymaattinen yhdiste
- Estää orgaanisen lian kiinnittymisen.
- Suihkutetaan instrumenttien pinnalle niin, että ne peittyvät.
- Ei roiskeita kuljetuksen aikana
- Täydellinen materiaaliyhteensopivuus
- Käyttövalmis
- Hajuton
- Tehokas entsyymiaktiivisuus
- Rekisteröity luokan I lääkinälliseksi laitteeksi
- Biohajoavuus 95 % (OCDE 302B)



DETECT & DISSOLVE
BIOFILM MATRIX

Käyttöohjeet

Käytä enziMed®-esipuhdistusainetta aina, kun instrumentit on esipuhdistettava.

- A.** Käytetään kirurgisten instrumenttien ja skooppien manuaaliseen puhdistukseen.
- B.** Vaikutusaika: 15 minuuttia
- C.** Huuhtelee instrumentit kauttaaltaan puhtaassa vedessä ennen niiden asettamista automaattiseen pesu- ja desinfiointilaitteeseen.
- D.** Entsyymiaktiivisuuden kesto: 72h

Kemialliset ominaisuudet

Ulkonäkö: Vaaleankeltainen neste
Tiheys: $1,005 \pm 0,05$ kg/l
pH: $7 \pm 0,5$

Pääainesosat

< 5 % ionittomia pintakäsittelyaineita
< 5 % fosfonaatteja

Monientsymaattinen yhdiste

Pakkaus

Tuotenumero OL20304 Pakkaus 6 x 750 ml

Varotoimenpiteet

- **Suojakäsineiden käyttö** on suositeltavaa.
- **Säilytä** suljetussa alkuperäisessä pakkauksessa lämpötilassa +4-+25 C:een lämpötilassa. Huomioi tuotteen käytössä viimeinen käyttöpäivä.
- **Tuotteen hävitys:** Pakkaus on valmistettu polyeteenistä ja voidaan hävittää kierrättämällä.
- Katso täydellinen käyttöturvallisuustiedote ennen käyttöä.

Maahantuonti ja markkinointi:

Berner Oy
Hitsaajankatu 24, 00810 Helsinki,
puh. 020 690 761, pro@berner.fi,
www.berner.fi/pro

onelif-biofilmfree.com