

Sterifilt

FAST

Sterifilt FAST on **steriili hiukkassuodatin**, joka on suunniteltu vähentämään huumaus- ja lääkeaineiden pistoskäyttöön liittyviä haittoja. Se takaa nopean, **yksivaiheisen suodatuksen**.

Tavoitteet:

- Suojata suonia.
- Ehkäistä paiseita, sydämen sisäkalvon tulehdusta ja keuhkokomplikaatioita.
- Vähentää suodattimien yhteiskäyttöä, joka on hepatiitti C:n riskitekijä.
- **Suodattaa helposti ja nopeasti.**

Suodatettu liuos, joka sisältää vaikuttavaa ainetta



Kalvo ja rei'itetty suojaosa
Suodattamaton liuos



YLEISSOPIVA KIINNITYS



Yhteensopiva neulattomien (Luer-liukukärkisten) ja kiinteäneulaisten ruiskujen kanssa mahdollistaen nopean ja yksivaiheisen suodatuksen.

● ESTÄÄ HIUKKASTEN PISTÄMISEEN LIITTYVIÄ HAITTOJA

Yli 10 µm:n kokoisia **liukenemattomia hiukkasia** on käytännössä kaikissa pistettävissä valmisteissa, kuten katuhuumeiden laimennusaineissa sekä tablettien ja kapselien apuaineissa.

- Ne **vahingoittavat suonja ja tukkivat keuhkosuonia.**
- Ne **lisäävät paiseiden ja sydämen sisäkalvon tulehduksen riskiä.**

Poistamalla käytännössä kaikki yli 10 µm:n kokoiset hiukkaset **Sterifilt FAST vähentää näitä riskejä huomattavasti.**

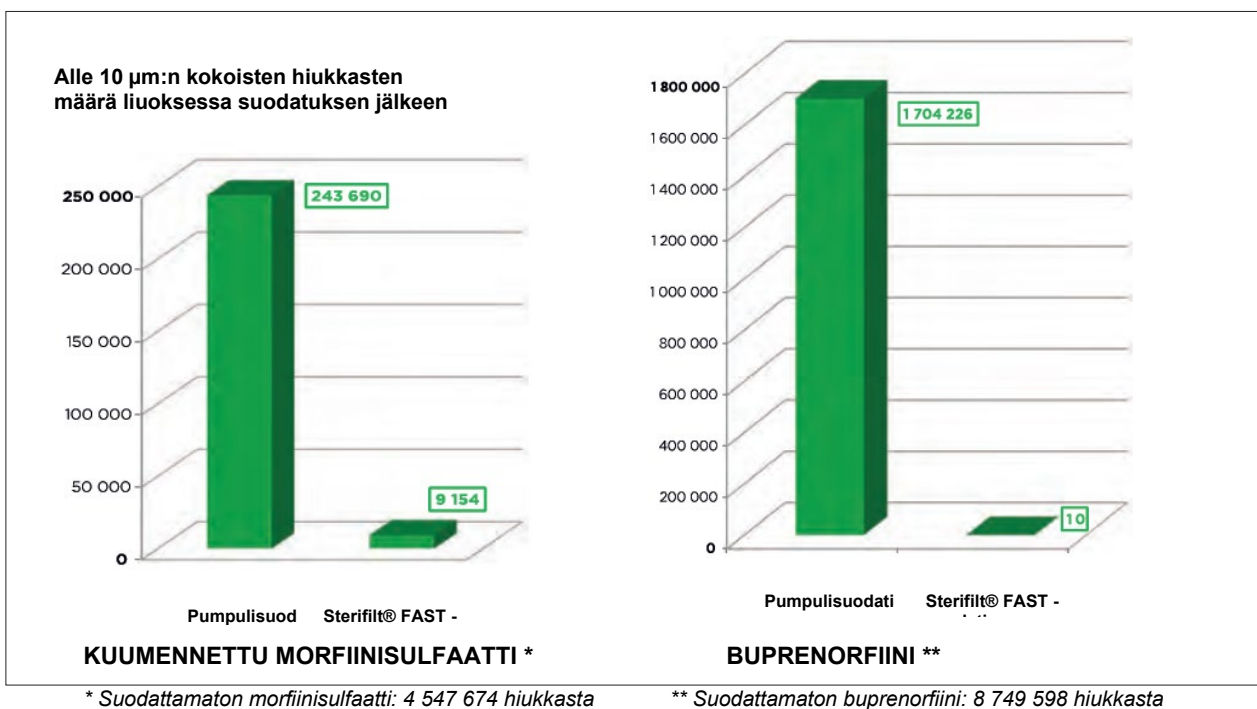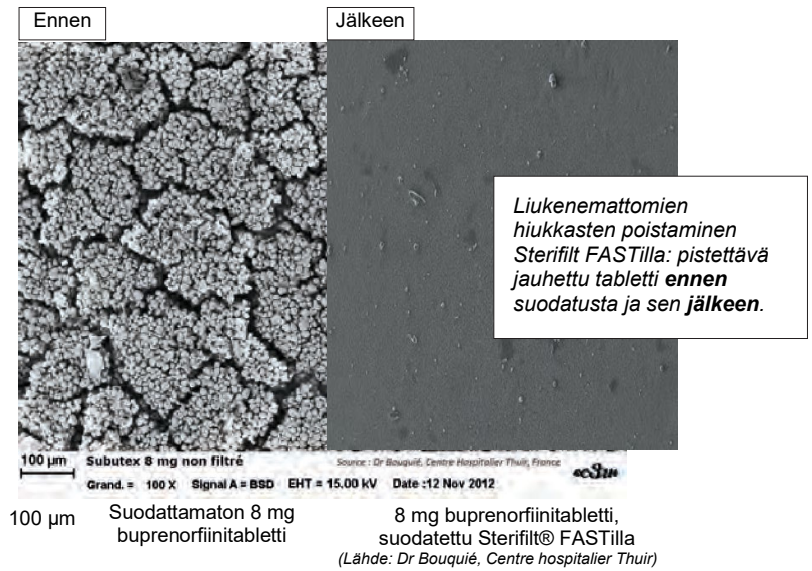

● VÄHENTÄÄ EI-STERIILIIEN SUODATTIMIEN KÄYTTÖÖN LIITTYVIÄ INFEKTOITA

Ei-steriilien suodattimien (savukkeet, pumpulitupot) käsittely kontaminoi ne usein bakteereilla ja sienillä. Sterifilt FASTin muotoilu ansiosta kädet eivät ole suoraan kosketuksissa suodatinkalvon kanssa. Lisäksi tuotetta jaetaan **steriileissä yksittäispakkauksissa.** Suodattimien uudelleenkäyttö ja jakaminen on yleinen syy hepatiitti C¹-viruksen leviämiseksi. Henkilöt, jotka käyttävät suodattimia uudelleen tai jakavat niitä, lisäävät viruksen leviämisen riskiä kertoimella 2,4–16,4. **Kalvosuodattimia käytetään harvemmin uudelleen kuin pumpuli- tai savukesuodattimia. Näin ollen Sterifilt FAST vähentää virusriskejä.**

¹ Useat kohortit ovat osoittaneet, että pumpulusuodattimien yhteiskäyttö on vahva tekijä HCV:n serokonversiossa – suhteellinen korjattu riski on 16,4 (Bruandet ym., 2006), 2,4 (Thorpe ym., 2002) ja 2,83 (Hagan ym., 2010)

VÄHENNÄ RISKEJÄ!

HIUKKASTEN SUODATUS ON TÄRKEÄ, JOSKAAN EI RIITTÄVÄ TOIMENPIDE!

- Valtaosa huumeiden pistoskäyttöön liittyvistä bakteri- tai sieni-infektioista on **iholla ja suussa esiintyvien** bakteereiden tai sienten aiheuttamia.
- Sterifilt FASTin käyttämisen lisäksi on suositeltavaa käyttää **steriilejä välineitä, pestä kädet, desinfioida pistoskohta ja olla nuolematta neulaa.**

YKSIKÄÄN SUODATIN EI POISTA VIRUKSIA: AINOA TAPA ESTÄÄ VIRUSTEN LEVIÄMINEN ON KÄYTTÄÄ VAIN OMIA VÄLINEITÄ.

Tutustu videoihimme ja muihin materiaaleihimme skannaamalla QR-koodi

