



DETECT & DISSOLVE
BIOFILM MATRIX




OneLife
enziMed® Standard

Matalavaahtoinen entsymaattinen pesuaine konepestävien instrumenttien ja välineiden pesuun

- Matalavaahtoinen entsymaattinen pesuaine
- Kirurgisten instrumenttien ja endoskooppien tehokkaaseen puhdistukseen
- Kustannustehokas

Käyttökohteet

Endoskoopit

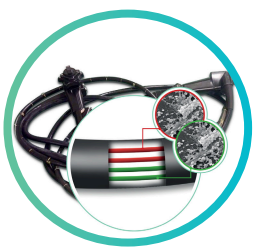

Kirurgiset instrumentit



Manuaalinen tai
puoliautomaattinen puhdistus



Automaattinen puhdistus

Tuoteominaisuudet

- Sopii lääkinnällisten laitteiden manuaaliseen ja automaattiseen puhdistukseen
- Soveltuu käytettäväksi useille materiaaleille
- Sopii ultraäänipuhdistukseen
- Pesu- ja desinfiointilaitteissa ei tarvitse olla neutralisointivaihetta.
- Kirkas hajusteeton ja väriaineeton neste
- Entsyymiaktiivisuus kestää neljän tunnin ajan laimennuksesta. Tee uusi liuos likaisuusasteen mukaisesti.



DETECT & DISSOLVE
BIOFILM MATRIX

Käyttöohjeet

Sopii kirurgisten instrumenttien ja endoskooppien automaattiseen ja manuaaliseen puhdistukseen.

- A.** Vakioannostelu: **0.3% - 1%** (3-10 ml/litra) likaisuusasteen mukaan.
- B.** Vaikutusaika: **vähintään 1 minuutti**; mieluiten 5-10 minuuttia.
- C.** Ihanteellinen käyttölämpötila: -> Manuaalinen puhdistus: **40 to 45°C** (min. 30°C – max. 55°C)
-> Automaattinen puhdistus: **50°C** (max. 55°C)

Lakisääteiset tiedot

- > 99-prosenttisesti biohajoava OCDE 302B:n mukaisesti (Zahn-Wellensin testi)
- Täyttää puhdistusaineita koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 648/2004 vaatimukset
- Vastaa lääkinällisiä laitteita koskevan direktiivin 93/42/ETY vaatimuksia

Kemialliset ominaisuudet

Ulkonäkö: Vaaleankeltainen neste
Tiheys lämpötilassa 20 °C (kg/L):
1,045 +/- 0,010
pH: 8,5 +/- 0,5
pH-arvo laimennettuna (1 %): 8 +/- 0,5

Pääainesosat

- 1 - 5% ionittomia pintakäsittelyaineita
- 1 - 5% anionisia pintakäsittelyaineita
- 1 - 5% sekvestrointiaineita
- <1% entsyymejä

Toimitusyksiköt

Tuotenumero	Pakkaus
OL20506	1 x 5 L
OL20508	1 x 6 L

Varotoimenpiteet

- **Käytä suojakäsineitä.** Katso täydellinen käyttöturvallisuustiedote ennen käyttöä.
- **Säilytä** suljetussa alkuperäisessä säiliössä +4...+25 °C:een lämpötilassa. Huomioi tuotteen käytössä sen viimeinen käyttöpäivä merkintä.
- **Tuotteen hävitys:** käyttämätön tuote on vietävä hävitettäväksi keräyspisteeseen.

Maahantuonti ja markkinointi:

Berner Oy
Hitsaajankatu 24, 00810 Helsinki,
puh. 020 690 761, pro@berner.fi,
www.berner.fi/pro

onelif-biofilmfree.com