

BERNER

MEDICAL

BERNER

**HUOMISEN
PUOLUSTAJA**
Yli 100 vuoden
kokemuksella



Lasten apuvälineet
Rifton Pacer -kävelyteline

PACER – VAKAA JA TURVALLINEN KÄVELYTELINE


Pacer on monipuolinen ja helppokäyttöinen kävelyteline sisä- ja ulkokäyttöön. Kävely Pacerilla on käyttäjälle turvallista ja miellyttävää. Pacer-kävelytelineettä voidaan käyttää kasvot tai selkä menosuuntaan päin. Avustajat arvostavat kävelytelineen helppoja ja monipuolisia säätömahdollisuuksia. Kävelytelineeseen voidaan lisätä monia erilaisia lisävarusteita jokaisen kävelijän tarpeisiin.

Rifton Pacer eri varustevaihtoehtoilla:



Miksi dynaaminen?

Kävely on monimutkainen toiminto, joka vaatii koko kehon, nivelten, lihasten ja hermojärjestelmän yhteistoimintaa. Kävelyn eri vaiheiden aikana lantio liikkuu normaalisti ylös-alas sekä sivusuunnassa. Pacerin ainutlaatuinen ominaisuus, dynaaminen liike, ohjaa lantion liikettä kävelyn aikana. Dynaaminen liike helpottaa kehon painonsiirtoja ja askelten ottamista.

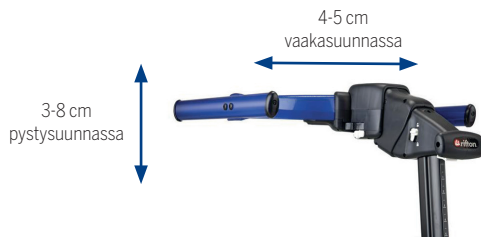

Pacerin dynaaminen ylärunko (lisävaruste) joustaa liikkeen aikana pystysuunnassa ja liikkuu vaakasuunnassa ohjaten lantion liikettä. Liike voidaan myös lukita pois käytöstä.

Pacerin alarunkovaihtoehdot:



Runko pikkupyörillä (standardi)



Runko isoilla pyörillä



Runko juoksumatolle

Monikäyttöinen ja säädettävä satulaistuim

Lantion hyvä asento on edellytys sujuvalle kävelylle. Säädettävällä satulaistuimella (Multi Position Saddle, MPS) saadaan lantio tuettua haluttuun asentoon. Satulaistuim ohjaa kävellessä myös jalkoja pysymään erillään toisistaan. Säätämällä satulaistuimen korkeutta voidaan helpottaa myös siirtymätilanteita. Satulaistuinta voidaan käyttää kävellessä kasvot tai selkä menosuuntaan ja se voidaan kääntää tilanteen mukaan.



RIFTON PACER -MITTATAULUKKO

KÄYTTÄJÄN MITAT

Mittaa etäisyys
taivutetusta kyynär-
päästä lattiaan
käyttäjän seistessä.



Kyynärkorkeus (cm)



Mini Pacer (K610)
39–52



Small Pacer (K620)
47–70



Medium Pacer (K630)
61–89



Large Pacer (K640)
81–119



XL Pacer (K650)
86–125

KÄVELYTELINEEN MITAT

Lattiasta käsiotteen yläosaan (cm)	39–52	48–74	61–89	81–119	86–125
Lattiasta istuimen ylä- osaan (vää'assa)* (cm)	N/A	25–50	24–60	43–89	50–95
Kokonaisleveys (cm)	52	Standardialarunko: 58 Rungot juoksumatolle Kapea: 89 Leveä: 102	Standardialarunko: 26 Isopyöräinen runko: 76 Rungot juoksumatolle Kapea: 89 Leveä: 102	Standardialarunko: 71 Isopyöräinen runko: 81 Rungot juoksumatolle Kapea: 89 Leveä: 102	Standardialarunko: 80
Kokonaispituus (cm)	57	Standardialarunko: 66 Alarungot juoksumatolle: 104	Standardialarunko: 76 Isopyöräinen runko: 91 Alarungot juoksumatolle: 104	Standardialarunko: 91 Isopyöräinen runko: 103 Alarungot juoksumatolle: 104	Standardialarunko: 100
Ylärunгон korkeus	32	Standardi- ja isopyöräinen runko: 41–53 Alarungot juoksumatolle: 58–89	Standardi- ja isopyöräinen runko: 55–69 Alarungot juoksumatolle: 60–93	Standardi- ja isopyöräinen runko: 72–98 Alarungot juoksumatolle: 76–119	Standardialarunko: 79–104
Alarungon korkeus (ilman yläkehikkoa) (cm)	N/A	Standardialarunko: 28 Alarungot juoksumatolle: 53	Standardi- ja isopyöräinen runko: 37 Alarungot juoksumatolle: 53–72	Standardi- ja isopyöräinen runko: 41 Alarungot juoksumatolle: 53–72	Standardialarunko: 47
Rungon paino (kg)	4,6	Standardialarunko: 5,2 Rungot juoksumatolle Kapea: 12,5 Leveä: 12,7 Ylärungot Standardi: 2,7 Dynaaminen: 3,4	Standardialarunko: 6,8 Isopyöräinen runko: 8,4 Rungot juoksumatolle Kapea: 12,5 Leveä: 12,7 Ylärungot Standardi: 3,4 Dynaaminen: 5,2	Standardialarunko: 7,0 Isopyöräinen runko: 8,7 Rungot juoksumatolle Kapea: 12,5 Leveä: 12,7 Ylärungot: Standardi: 4,3 Dynaaminen: 6,1	Standardialarunko: 10,2 Ylärungot Standardi: 5,0 Dynaaminen: 6,8
Dynaamisen ylärunгон liike (cm)	N/A	Pystysuunnassa: 3 Vaakasuunnassa: 4	Pystysuunnassa: 8 Vaakasuunnassa: 5		
Pyörien halkaisija (cm)	10		Standardialarunko & alarungot juoksumatolle: 14 Isopyöräisen alarungon etupyörät: 20 Isopyöräisen alarungon takapyörät: 29		
Juoksumaton max.mitat (L x K) (cm)	N/A	Kapea alarunko juoksumatolle: 73 x 28 Leveä alarunko juoksumatolle: 86 x 28			N/A
Maksimikuormitus (kg)	22	34	68	90	113

*Mitta on otettu rungon ja satulaistuimen ollessa säädettyinä matalimmilleen ja korkeimmilleen.



Jäikö jokin asia askarruttamaan? Autamme mielellämme!

medlab.tilaukset@berner.fi | 020 690 761 | www.bernermedical.fi

Tilaukset:

medlab.tilaukset@berner.fi

Reklamaatiot sekä tuotteiden käyttöön liittyvät ongelmatilanteet:

med.huolto@berner.fi | 020 690 761

BERNER
MEDICAL

Berner Medical on terveydenhuollon ammattilaisten luotettava kumppani. Parannamme elämänlaatua tarjoamalla ratkaisuja ihmisen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn ylläpitämiseen. Palvelemme julkista ja yksityistä terveydenhuoltoa, hoivasektoria sekä ammattipuhtauteen erikoistuneita yrityksiä. Vahvuuksiamme ovat kattava tuotevalikoima, toimitusvarmuus, tuotekoulutus ja monialainen asiantuntijuus.

Tutustu meihin www.bernermedical.fi.