



FlowflexTM SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (Self-Testing)

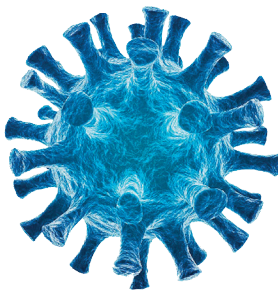

Pikatesti SARS-CoV-2:n nukleokapsidiantigeenin kvalitatiiviseen havaitsemiseen nenän etuosasta otettavasta näytteestä. Itsesuoritettavaan testaukseen.

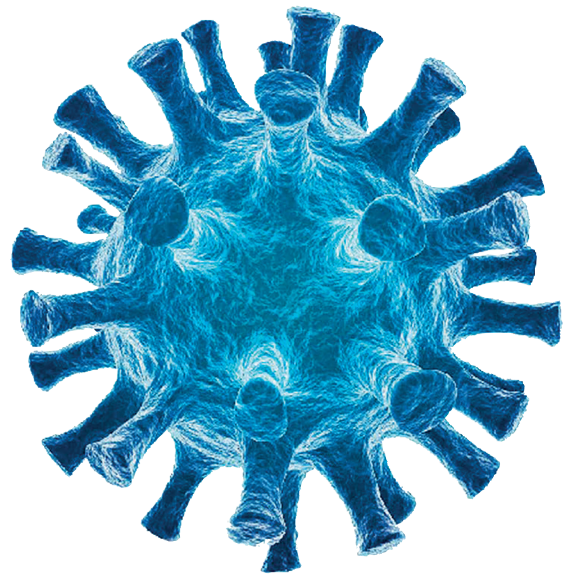

Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (Self-Testing) 1 testi

Tuotenumero: L031-118M5

Pakkauskoko: 1 testi/pakkaus

Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (Self-Testing) 5 testiä

Tuotenumero: L031-118P5

Pakkauskoko: 5 testiä/pakkaus

Pikatestauksen globaali johtaja **26** vuoden kokemuksella.



Nopea



Tarkka



Helppo käyttää



Luotettava



CE-merkitty

Flowflex Antigen Rapid Test (Self-Testing)

SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test on lateral flow-kasettitesti SARS-CoV-2-nukleokapsidiantigeenin havaitsemiseen nenän etuosasta otettavissa vanupuikkonäytteissä suoraan henkilöiltä, joilla epäillään COVID-19-infektiota (seitsemän ensimmäisen päivän aikana oireiden ilmaantumisesta). Testiä voidaan käyttää myös oireettoman henkilön näytteiden testaamiseen.

- Näyte: nasaalinäyte
 - Testausaika: tulokset 15 minuutissa
 - Käyttöaika: 24 kuukautta
 - Säilytyslämpötila: +2- +30° C.
 - Tarkkuus: 98,8 %
 - Spesifisyys: 99,5 %
 - Herkkyyks: 97,1 %
- Ei saa jäätyä!

Testausmenetelmä

1. Testin valmistelu

A. Avaa testipakkaus.




B. Sinulla tulisi olla:

Huom! 1T- ja 5T- testeissä, reikä on pakkauslaatikossa.




Testikasetti

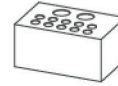

Putkiteline (vain 5T)



Uuttoliuosputki

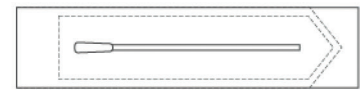

Kertakäyttöinen näytepuikko



Pakkausohjeet



Jätepussi

C. Pese tai desinfioi kätesi.




D. Lue ohjeet.



E. Tarkista viimeinen käyttöpäivä.



F. Avaa foliopussi.

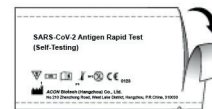

G. Tarkista kasetti.




2. Näytteenotto

AIKUISEN HUOLTAJAN OTTAMA NÄYTE




tai


ITSE OTETTU NÄYTE

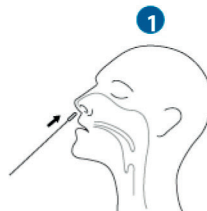


1 Työnnä näytepuikon koko imukykyinen kärki sieraimen. Työnnä näytepuikko varovasti kiertäen enintään 2,5 cm sisään sieraimen reunasta laskien.

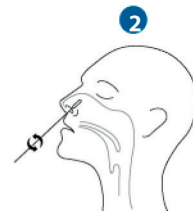

2 Pyöritä näytepuikkoa 5 kertaa sieraimessa seinämiä vastaan

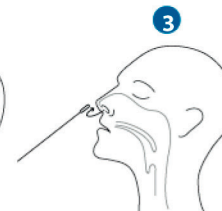

3 Poista näytepuikko sieraimesta ja toista testi samalla näytepuikolla toisessa sieraimessa.

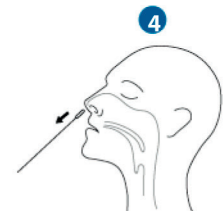


4 Poista näytepuikko sieraimesta.

3. Näytteen valmistelu




Poista alumiinifolio.

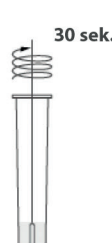


30 sek.

Laita näytteen sisältävä näytepuikko uuttoputkeen ja pyöritä 30 sekunnin ajan.

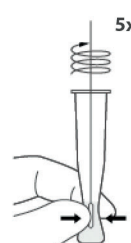

5x

Pyöritä näytepuikkoa 5 kertaa ja purista samalla putken reunoja.

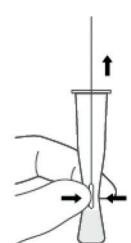

Poista näytepuikko puristamalla putkea.

4. Testin suorittaminen



4 tippaa prosessoitua näytettä



Näytesyvennyks




15-30 min.



Negatiivinen



Positiivinen

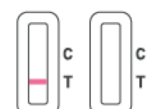

Mitätön