

DEBRICHEM

Uusi hoitomenetelmä Debrichem on paikalliseen käyttöön tarkoitettu valmiste ei-kirurgisten infektoituneiden haavojen puhdistukseen ja hoitoon. Debrichem eliminoi biofilmin ja poistaa infektion haavalta kokonaan yhden 60 sekunnin kertakäsittelyn aikana. Käsittelyn jälkeen yli 90% haavoista alkaa parantua. Debrichem-valmisteen vaikutus perustuu biofilmiä muodostavien ja tulehdusta aiheuttavien proteiinien ja patogeenien kuivattamiseen haavapohjassa, mikä on uusi ja erittäin lupaava ratkaisu kroonisten haavojen hoidossa. Vaikuttavana tekijänä on metaanisulfonihappo, joka reagoi biofilmin sisältämän veden kanssa. Debrichem on tarkoitettu ainoastaan terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön.

Koostumus

Metaanisulfonihappo, dimetyylisulfoksidi, pyrogeeninen piidioksidi, tetraetyylisilikaatti, parapunainen
Ulkonäkö: Punainen, geelimäinen, viskoosinen liuos

Käyttöohjeet

1. Aseta potilas hoitopöydälle mukavaan asentoon niin, että haava on helposti hoidettavissa.
2. Pue suojakäsineet ja -lasit ja suojaa haavaa ympäröivä iho liinoilla.
3. Lue varotoimet ja varoitukset.
4. Poista vanhat sidokset haavalta.
5. Huuhtelee haava keittosuolaliuoksella.
6. Puhdista haava tarvittavin toimenpitein ja kuivaa haavapohja kuivilla taitoksilla.
7. Käytä tarvittaessa paikallisuudutetta ja poista puudute haavalta heti, kun se on alkanut vaikuttaa. Lue käytössä olevan paikallisuudutteen käyttöohjeet.
8. Ravista Debrichem-pulloa ennen avaamista. Älä käytä valmistetta, jos pullo on avattu aikaisemmin.
9. Avaa pullo irrottamalla sinetti ja korkki. Lue varotoimet ja varoitukset.
10. Aloita kaatamalla Debrichemiä haavalle.
11. Levitä Debrichemiä tasaisesti haavaan hansikassormella.
12. Peitä koko haavapohja Debrichemillä ja anna lioksen vaikuttaa haavalla enintään 60 sekuntia.
13. Huuhtelee haava keittosuolaliuoksella.
14. Poista kuollut kudos haavalta kuivalla taitoksella.
15. Kuivaa haava taitoksilla.
16. Peitä haava asianmukaisella sidoksella.
17. Hävitä pullo ja jäljellä oleva liuos käyttöohjeiden mukaisesti.



Säilyttäminen ja varastointi

Debrichem on säilytettävä omassa pakkauksessaan suojassa suoralta auringonvalolta. Tarkista säilytyslämpötila pakkauksen etiketistä. Tarkasta pakkaus vaurioiden varalta ennen avaamista. Hävitä pakkaus, mikäli se on vioittunut.

Poista tuote varovasti pakkauksesta. Käyttämättä jäänyt liuos on hävitettävä. Tuote on kertakäyttöinen. Älä käytä tuotetta uudelleen.

Säilyvyys: 3 vuotta valmistuksesta.

Hävittäminen: Huuhtelee pullossa jäljellä oleva liuos vesijohtovedellä. Hävitä huuhdeltu pullo lasijätteeseen ja korkki muovijätteeseen.

Yleiset turvallisuusohjeet

Vain ulkoiseen käyttöön. Älä käytä infuusioon tai injektioon. Älä niele. Jos tuotteelle altistutaan tahattomasti, huuhtelee aine välittömästi pois vedellä. Älä käytä potilailla, jotka ovat allergisia mille tahansa ainesosalle. Älä käytä raskaana olevilla tai imettävillä potilailla.

Valmistaja

DEBx Medical BV
Boompjes 40, 3011 XB, Rotterdam, Alankomaat

DEBRICHEM 3 ml

Tuotenumero: DMDD01
Myyntierä: 10 kpl

21032023



Käytössä huomioitavaa

Vasta-aiheet

- Iskeemiset haavat ennen tehokasta revaskularisaatiota
- Kasvaimiin liittyvät, neoplastiset haavat
- Taustalla avaamista vaativa paise tai faskiitti
- Taustalla osteomyeliitti
- Allergia tai intoleranssi mille tahansa valmisteen ainesosalle
- Debrichemin turvallisuutta ja tehoa ei ole tutkittu lasten tai nuorten hoidossa eikä raskaana olevilla tai imettävillä naisilla. Näiden potilaiden kohdalla tulisi harkita muita vaihtoehtoja haavan puhdistamiseksi.

Varotoimet ja varoitukset

- Käytä suojalaseja Debrichemin käytön aikana.
- Käytä suojakäsineitä (nitriili, polyeteeni tai polypropeeni).
- Älä jätä tuotetta haavalle yli 60 sekunniksi.
- Terveydenhuollon ammattilaisen on varmistettava limakalvojen, kasvojen ja uusiutuvien kudosten riittävä suojaaminen tuotteelle altistumiselta, kun tuotetta käytetään niiden läheisyydessä.
- Käytä aina liinoja ihon suojaukseen.
- Puhdista haava perusteellisesti kaikista aiemmin käytetyistä aineista ja valmisteista.
- Tuote on käytettävä pullon avaamisen jälkeen, käyttämättä jäänyt liuos on hävitettävä.
- Alan kirjallisuudessa on esiintynyt satunnaisia selvityksiä, joiden mukaan happamat paikalliset haavanpuhdistusaineet voivat viivästyttää haavan paranemista.
- Debrichem on tarkoitettu ainoastaan terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön.
- Älä käytä tuotetta, jos pakkaus on avattu tai sinetti on rikottu.
- Ihoa ja silmiä syövyttävä, huuhtelee välittömästi
- Ärsyttävä

Haittavaikutukset

- Potilaat, joilla ei ole sensorista neuropatiaa, voivat tuotteen levityksen yhteydessä kokea polttelun tai pistelyn tuntemuksia. Nämä oireet häviävät yleensä muutaman minuutin kuluessa. Paikalliskipulääkettä voidaan käyttää terveydenhuollon ammattilaisen arvion mukaisesti ennen Debrichem-valmisteen käyttöä.
- Punoitus, turvotus, ihoärsytys, eryteema, ensimmäisen asteen palovamma.

Yleiset turvallisuusohjeet

Vain ulkoiseen käyttöön. Älä käytä infuusioon tai injektioon. Älä niele. Jos tuotteelle altistutaan tahattomasti, huuhtelee aine välittömästi pois vedellä. Älä käytä potilailla, jotka ovat allergisia mille tahansa ainesosalle. Älä käytä raskaana olevilla tai imettävillä potilailla.