

EN 13624 • EN 13697 • EN 13727 • EN 14348 • EN 14476 • EN 16615



Bea Pron etanolipohjainen pesevä ProWipes desinfektiopyyhe terveydenhuollon hoitoympäristön pinnoille sekä laitteille ja tarvikkeille, joilla ei läpäistä ihoa tai limakalvoja. Vaikuttavina aineina 75% alkoholi (70% etanolia, 5% isopropanolia) sekä pesevänä ainesosana alkyylipolyglukosidi C8-10. Laadukas kansimekanismi takaa, että pakkaus on helposti avattavissa ja suljettavissa uudestaan.

Mikrobisidinen teho

- EN 13624 Kvantitatiivinen suspensiotesti hiivoja tappavan tehon määrittämiseksi terveydenhuollossa (2/1)
- EN 13697 Kvantitatiivinen pintatesti bakteereja ja hiivoja tappavan tehon määrittämiseksi (2/2)
- EN 13727 Kvantitatiivinen suspensiotesti bakteereja tappavan tehon määrittämiseksi terveydenhuollossa (2/1)
- EN 14348 Kvantitatiivinen suspensiotesti mykobakteereja tappavan tehon määrittämiseksi (2/1)
- EN 14476 +A1 Kvantitatiivinen suspensiotesti virusidisen tehon osoittamiseksi terveydenhuollossa (2/1)
- EN 16615 Kvantitatiivinen terveydenhuollon pyyhintätesti bakteereja ja hiivoja tappavan tehon määrittämiseksi terveydenhuollossa (2/2)

Käyttöohje

Käytä pesevää etanoli desinfektiopyyhettä alkoholia kestävien pintojen puhdistamiseen ja desinfiointiin. Noudata desinfioitavan välineen tai kohteen valmistajan ohjetta soveltuvista desinfektioaineista. Tarkista, että pakkauksen säilyvyysaika on voimassa. Desinfioi kädet ja pue suojakäsineet. Ota pyyhe ja sulje pakkaus huolellisesti. Pyyhi pinta niin, että se kastuu kauttaaltaan. Erittäin likaisiin pintoihin saatetaan tarvita useampia pyyhkeitä. Noudata annettua desinfektioaikaa. Hävittä pyyhe ja pakkaus paikallisten säädösten mukaisesti.

HUOM! Merkitse pakkaukseen päivä, jolloin pakkaus on avattu ensimmäisen kerran.

Koko

300 x 200 mm

Pakkaus ja ympäristö

Pakkaukset ja pyyhkeet ovat kierrätettäviä. Pyyhkeiden materiaali on 50 g non-woven polyesteri. Pakkaukset ovat PET/PE-muovia. Sekä pyyhkeet että pakkaukset ovat kierrätettäviä ja voidaan hävittää energiajätteenä.

Säilyvyys ja kelpoisuusaika

Säilyvyys avaamattomana 2 vuotta valmistuksesta ja 3 kuukautta avaamisen jälkeen. Säilytä viileässä, kuivassa paikassa.

Alkuperämaa

Iso-Britannia

Koostumus

Etanoli 70 %
Isopropanoli 5 %
Alkyylipolyglukosidi C8-10

pH 5-7

Bea Pro ProWipes desinfektiopyyhe, pesevä etanoli 300 x 200 mm 25 kpl

Tuotenumero: 15770154
Myyntierä: 20 pkt
Lava: 1000 pkt
GTIN vähittäistuote: 414504964913
GTIN kuljetuspakkaus: 5025254060810

20220218