

# SENSOMATIC

## Elektroninen automaattiannostelija



Nopeakäyttöinen, tehokas ja turvallinen. Sensomatic soveltuu sekä käsihuuhteen että pesunesteen automaattiseen annosteluun. Sensomatic-automaattiannostelija on kehitetty KTL:n, Oraksen, TYKSin ja Tekesin yhteistyönä. Automaattiannostelijaan sopivat kaikki merkittävimpien valmistajien dispensopakkaukset. Tyhjentyneen dispensopakkauksen vaihtaminen korkkeineen vähentää kontaminoitumisriskiä ja parantaa näin turvallisuutta. Annostelu tapahtuu ilman kosketusta ja laite annostelee automaattisesti halutun määrän.

### Tuotetiedot

15700003 Sensomatic Single Dose, valkoinen (yksi annos)  
Laitte annostelee automaattisesti yhden annoksen eli 1,5 ml käsihuuhdetta tai pesunestettä annostelualueella oleviin käsiin. Käytettäessä annostelijaa käsihuuhdeannosteluun, riittävän desinfektioainemäärän (3 ml) varmistamiseksi annostelu tulee toistaa.

15700002 Sensomatic Double Dose, valkoinen (kaksi annosta)  
Laitte annostelee automaattisesti kaksi annosta eli kaksi kertaa 1,5 ml käsihuuhdetta tai pesunestettä annostelualueella oleviin käsiin. Kirurgisessa käsien desinfektiossa käsihuuhdetta annostellaan toistuvasti niin usein, että kädet pysyvät kosteina 3 minuuttia kestäväen desinfektiohieronnan ajan.

### Tekniset tiedot

Annos	1,5 ml
Annostelu-aika	3 s (kaksi annosta)
Tunnistusalue	3-10 cm
Paristot	4 x LR-20 (D-koko)
Paristojen kesto	12 000 käyttökertaa tai 3 vuotta
Kiinnitys	Seinään ruuvattava

### Pakkauksen ja paristojen vaihtaminen


Dispensopakkausta vaihdettaessa liiketunnistin käännetään off-asentoon. Kansi avataan alaosassa olevan painikkeen avulla. Tyhjän pakkauksen tilalle vaihdetaan uusi ja kansi suljetaan. Dispensopakkausta asennettaessa on huolehdittava, että korkin painikepuoli (pallo) on käännettynä laitteen taustaa kohten.

Sensomatic ilmoittaa paristojen loppumisesta vilkkuvalla, punaisella merkivalolla. Paristot sijaitsevat takapaneelin sisäpuolella. Liiketunnistin käännetään off-asentoon. Kansi avataan alaosassa olevan painikkeen avulla. Dispensopakkaus poistetaan. Paristolokeron kansi avataan käsin ja paristot vaihdetaan.

### Takuu

Takuu-aika on kaksi vuotta laitteen ostopäivästä. Takuu koskee valmistus- ja raaka-ainevirheitä, mutta ei virheitä ja vaurioita, jotka aiheutuvat tuotteen virheellisestä asennuksesta, käytöstä tai korjauksesta. Takuu ei koske paristoja.

Sensomatic katkaisee kosketustartuntatien, joten sen avulla voidaan parantaa potilaiden, asiakkaiden ja työntekijöiden turvallisuutta sairaaloissa ym. terveydenhuollon laitoksissa, elintarvike-, hammashuolto-, laboratorio-, lääkehuolto- jne. tiloissa.

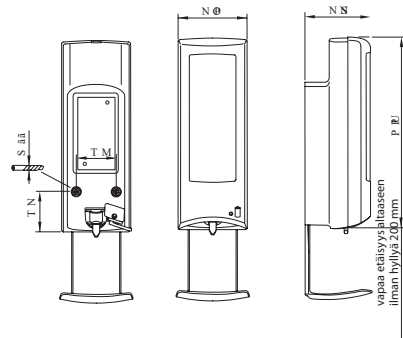

20200330